



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Collare cervicale Philadelphia

Codice di riferimento: MOD PHILADELPHIA 961

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 71.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD PHILADELPHIA 961-Small-2 1/4	2 1/4 (cm 5, Small)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Small-3 1/4	3 1/4 (cm 8, Small)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Small-4 1/4	4 1/4 (cm 10, Small)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Small-5 1/4	5 1/4 (cm 13, Small)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Medium-2 1/ 2 1/4	(cm 5, Medium)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Medium-3 1/ 3 1/4	(cm 8, Medium)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Medium-4 1/ 4 1/4	(cm 10, Medium)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Medium-5 1/ 5 1/4	(cm 13, Medium)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Large-2 1/4	2 1/4 (cm 5, Large)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Large-3 1/4	3 1/4 (cm 8, Large)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Large-4 1/4	4 1/4 (cm 10, Large)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-Large-5 1/4	5 1/4 (cm 13, Large)	71.9€

MOD PHILADELPHIA 961-XLarge-2 1/ 2 1/4 (cm 5, XLarge)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-XLarge-3 1/ 3 1/4 (cm 8, XLarge)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-XLarge-4 1/ 4 1/4 (cm 10, XLarge)	71.9€
MOD PHILADELPHIA 961-XLarge-5 1/ 5 1/4 (cm 13, XLarge)	71.9€

CARATTERISTICHE:

Il collare cervicale bivalente è un prodotto morbido ed ergonomico che migliora l'immobilizzazione del rachide cervicale. Leggero e facile da indossare, garantisce l'uso in ogni situazione.

APPLICAZIONI:

- Traumi cervicali
- Metastasi Cervicali
- Cervicalgie

MARCA E MODELLO:

Tielle Camp Mod Philadelphia 961

DIMENSIONI E PESO:

Misura girocollo:

- Small (da 25,4 a 33 cm)
- Medium (da 33 a 40,6 cm)
- Large (da 40,6 a 48,3 cm)
- XLarge (oltre 48,3 cm)

Tutti i collari sono disponibili nelle seguenti altezze:

- 2 1/4 (cm 5,50)
- 3 1/4 (cm 8,00)
- 4 1/4 (cm 10,50)
- 5 1/4 (13,00)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un collare cervicale bivalente con foro tracheale.

Collare cervicale Philadelphia: ecco le caratteristiche

Il collare cervicale Philadelphia rappresenta il più diffuso presidio medico per immobilizzare e proteggere il rachide cervicale, ovvero la parte della colonna vertebrale che si trova in corrispondenza della nuca.

Viene usato in presenza di danni, traumi o dolore: in queste situazioni preservare questa zona è fondamentale e questo tutore ci consente di raggiungere l'obiettivo. Vuoi approfondire l'argomento? Vediamo subito quali sono le caratteristiche del Collare Cervicale Philadelphia!

Collare Cervicale Philadelphia: a cosa serve e come si usa

In commercio esistono diversi tipi di [collare cervicale](#): alcuni rigidi, altri morbidi.

Oggi ti parliamo di collare semirigido in due pezzi che si uniscono tramite cinghia e con un foro tracheale, che consente di valutare il polso carotideo ed eventualmente ricorrere a una tracheotomia d'urgenza senza rimuovere il supporto.

Questo dispositivo è costituito da due elementi: uno è posizionato anteriormente e sostiene il mento poggiando sullo sterno, il secondo si trova nella parte posteriore in corrispondenza della nuca. Grazie alla sua struttura consente di immobilizzare totalmente la zona stimolando una veloce ripresa e il ripristino delle condizioni di salute ottimali.

Si tratta di un collare riutilizzabile realizzato in materiale impermeabile: perciò dopo ogni uso può essere lavato con acqua e sapone e disinfettato per evitare proliferazione di pericolosi batteri.

Vediamo ora come si indossa il collare.

La prima applicazione deve essere eseguita da personale medico/sanitario che deve accertarsi dell'assenza di ferite, tagli o abrasioni. Si può indossare sia in posizione supina che seduta.

Solitamente l'operazione si esegue in coppia: il primo si accerta che ci sia l'allineamento della cervicale, il secondo si occupa di inserire prima la parte anteriore, su cui poggia il mento, per poi far scorrere la cintura fino alla nuca e proseguire inserendo il secondo pezzo che poggia sulla zona occipitale e dorsale. Dopo averlo posizionato si procede con la regolazione della cinta a seconda delle necessità del paziente.

Consigliamo vivamente di non eseguire la prima operazione da soli, perchè si potrebbe compromettere la salute della cervicale.

Questo tipo di collare cervicale si usa nelle seguenti situazioni:

- *Traumi della cervicale, come i [colpi di frusta](#)*
- *Distorsioni, discopatie e [fratture vertebrali](#) che hanno origine in questa zona*
- *Dopo un intervento chirurgico alla cervicale*
- *[artrite reumatoide](#) del tratto cervicale*


In tutti questi casi il collare porta un immediato sollievo e aiuta a ritrovare il benessere.

Leggi anche: ["Soffri di dolori cervicali? Ecco 3 esercizi pensati per te!"](#)

COLLARI CERVICALI PHILADELPHIA PER BAMBINI E ADULTI

Nel nostro negozio online puoi trovare diversi modelli di collare cervicale con foto per tracheotomia, tra cui anche soluzioni per [bambini](#).

*Inoltre puoi trovare anche soluzioni più complesse, realizzate in materiali di ultima generazione, come il **collare cervicale bivalve** con altezza regolabile che consente di variare il livello della trazione. Inoltre, è ultraleggero e ha una conformazione che lo rende comodo, traspirante e poco ingombrante, è un ottimo aiuto per chi è costretto a usare il collare per diversi mesi.*

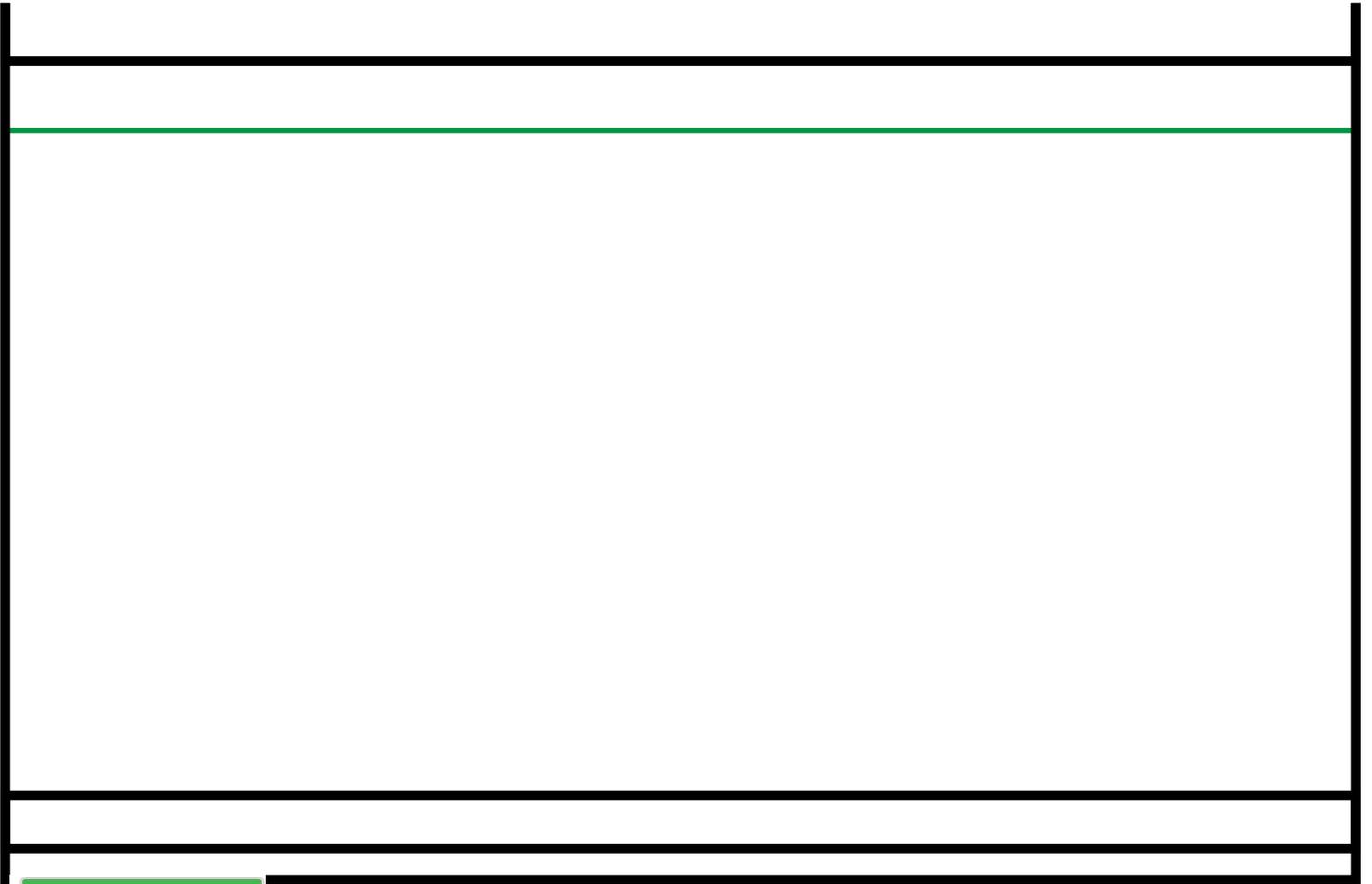

 **Acquista subito**