

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 28692 - Speedicath® Compact Uomo - Compact Uomo Nelaton - Misura Ch 12 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-28692

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 109.8€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	28692
Nome prodotto:	SpeediCath® Compact uomo Nelaton
Durata di conservazione (anni):	2
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	300
Conf/cartone:	10
PARAF:	931465494
EAN:	5708932498319
ISO:	09.24.06.012
Misura:	CH 12
Lunghezza tubo (cm):	33,5
Qta rimb. / mese:	120

VANTAGGI:



Per saperne di più

Discreta

SpeediCath Compact Uomo è compatto e discreto, pertanto può essere portato facilmente in tasca o in borsa. Nessuno immaginerà che si tratta di un catetere.



Per saperne di più

Pronto all'uso

Per garantire che il cateterismo richieda il minor tempo possibile, SpeediCath Compact Uomo è prelubrificato e immediatamente pronto all'uso, senza aggiungere acqua o lubrificante.



Per saperne di più

Facile da usare

SpeediCath Compact Uomo è semplice da aprire e pratico da smaltire. Il suo design telescopico facilita l'orientamento e il controllo del catetere durante l'inserimento e, grazie alla sua rigidità, non è necessario toccare il catetere stesso. Il tutto ottenuto senza compromettere le prestazioni, la sicurezza e l'igiene.

DESCRIZIONE:

SpeediCath® Compact Uomo è compatto e discreto senza compromettere le prestazioni, la sicurezza o l'igiene. Grazie alla sua funzione telescopica brevettata, è facile da orientare e controllare durante l'inserimento. SpeediCath® Compact Uomo può essere inserito senza toccare la sezione rivestita ed è fornito immediatamente pronto all'uso con il suo rivestimento idrofilo uniforme.

VIDEO:

TESTIMONIANZE:

DOMANDE E RISPOSTE:

D: Come è possibile rendere SpeediCath Compact Uomo così piccolo?

R: Grazie al design telescopico, misura meno della metà delle dimensioni di un catetere standard per l'uomo. SpeediCath Compact Uomo può quindi essere riposto, trasportato, utilizzato e smaltito in modo più discreto.

D: Il passaggio creerà disagio durante l'utilizzo del catetere?

R: Utilizzando SpeediCath Compact Uomo non si avvertirà una sensazione diversa dall'utilizzo di un catetere normale come SpeediCath (1,2).

D: Come faccio ad aprire SpeediCath Compact Uomo?

R: SpeediCath Compact Uomo è molto facile da aprire, anche per gli uomini con una manualità limitata. Tenere il catetere in verticale in modo che la punta sia rivolta verso l'alto e aprire ruotando il tappo.

D: Come devo preparare il catetere per l'uso?

R: Non è necessaria alcuna preparazione, SpeediCath Compact Uomo è subito pronto per l'uso, grazie all'esclusivo rivestimento idrofilo, presente anche sulla superficie dei fori smussati. In questo modo si garantisce un cateterismo molto facile durante l'inserimento e la rimozione.

D: SpeediCath Compact Uomo è più corto di un normale catetere. È abbastanza lungo per consentire uno svuotamento completo della vescica?

R: SpeediCath Compact Uomo è progettato per essere discreto e più corto di un catetere normale, senza però comprometterne la capacità di svuotare la vescica in modo efficace (3).

D: Solitamente utilizzo un CH14. L'utilizzo di SpeediCath Compact Uomo mi consentirà di svuotare la vescica con la stessa rapidità?

R: SpeediCath Compact Uomo è un nuovo tipo di catetere, una combinazione tra un CH12 e un CH18. Il tempo necessario per svuotare la vescica piena sarà pressoché lo stesso di un CH14 e SpeediCath Compact Uomo. Occorreranno circa 4 secondi in più per svuotare una vescica piena di 400 ml, ma SpeediCath Compact Uomo è risultato

essere molto più facile da inserire.

D: È possibile richiudere e smaltire il catetere in modo discreto?

R: Il tappo può essere nuovamente serrato senza alcun rischio di perdite. Dopo l'uso, è sufficiente riposizionare il tappo, continuando a mantenere la massima discrezione, senza che nessuno noti che si sta smaltendo un catetere.

Fonti

1) Bagi et al. Sicurezza di un nuovo catetere intermittente compatto per l'uomo: studio cross-over 1, randomizzato, condotto in singolo cieco su volontari sani di sesso maschile. Accettato per la pubblicazione su "Urologia Internationalis".2) Chartier-Kastler et al. Sicurezza di un nuovo catetere compatto per l'uomo con disfunzione vescicale neurologica: studio cross-over, randomizzato, condotto in aperto. Presentato su "Spinal Cord".3) Domurath et al. Urina residua dopo il cateterismo intermittente in soggetti di sesso maschile utilizzando un catetere di nuova concezione (SpeediCath Compact Uomo) e un catetere convenzionale per l'uomo (SpeediCath). Presentato su "Spinal Cord".

