



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5160 - Conveen Security+ Sacca Urina Da Gamba - Conf. Senza Laccetti Tubo 30 Cm - 500 MI - 8 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5160


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 31.1€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5160
Nome prodotto:	Sacche gamba riutilizzabili (conf. senza laccetti) tubo 30cm 500ml
Durata di conservazione (anni):	5
Pezzi / confezione:	8
Pezzi / cartone:	80
Conf/cartone:	10
PARAF:	902244666
EAN:	5701780752978
ISO:	09.27.04.006
Capacità:	500 ml
Lunghezza tubo (cm):	30
Qta rimb. / mese:	8


VANTAGGI:

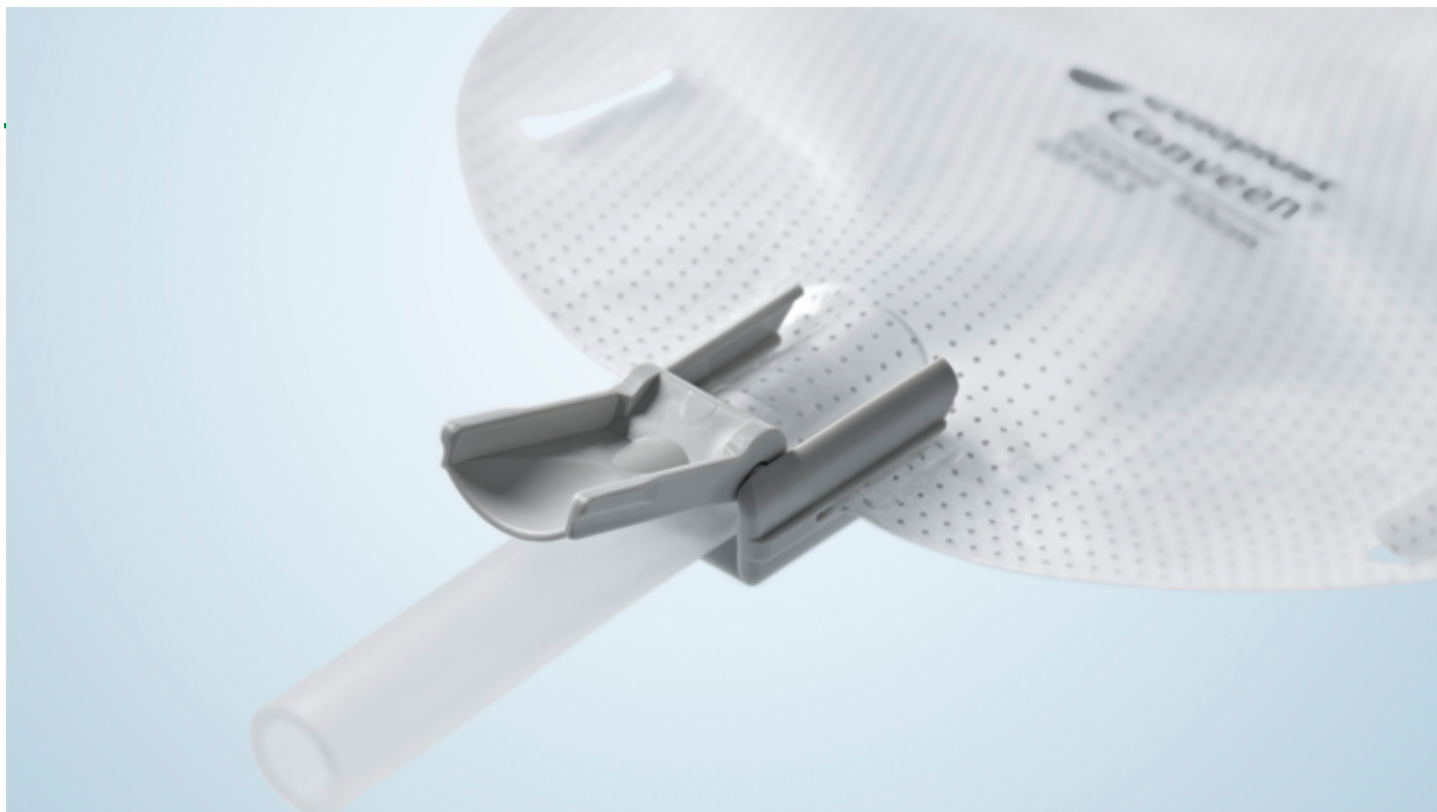

[Leggi i vantaggi più importanti](#)

Raccolta urinaria sicura e affidabile

Le sacche da gamba Conveen Security+ sono dotate di un tubo anti-attorcigliamento che riduce il rischio di riflusso.
Vantaggi principali
La valvola di scarico a morsetto progettata su misura è facile da usare e consente inoltre di verificare facilmente la corretta chiusura.
Il supporto morbido la rende comoda da indossare.
Il design suddiviso in sezioni riduce la possibilità di schiacciare la sacca durante il movimento.
Il design e il colore discreti riducono la visibilità delle sacche sotto gli indumenti.

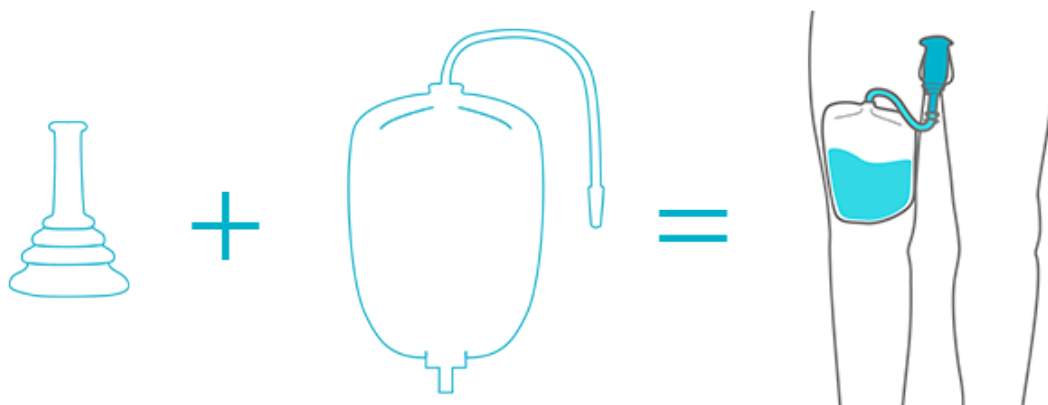

Scegli la tua soluzione per l'incontinenza

Trova la tua soluzione Conveen

È molto importante trovare la combinazione di guaina urinaria e sacca per l'urina che si adatti alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Conveen è una soluzione personalizzabile, pertanto ti consigliamo di rispondere ad alcune domande per individuare la soluzione di guaina e sacca che fa al caso tuo.

DESCRIZIONE:

Scelta del morsetto o valvola di scarico a leva
La valvola di scarico a morsetto consente di verificare facilmente la corretta chiusura
La valvola di scarico a leva è facile da usare
Rivestimento in morbido tessuto per aumentare il comfort
Il tubo anti-attorcigliamento riduce il rischio di reflusso e impedisce la fuoriuscita accidentale
Senza PVC e ftalati
Porta di campionamento opzionale (singola) senza ago per eliminare il rischio di ferirsi
Il tubo di uscita esteso impedisce il contatto con l'urina durante lo svuotamento
Design discreto e moderno
Combinazione di colori per una minore visibilità sotto gli indumenti

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

DOMANDE E RISPOSTE:

D: Con quale frequenza devo sostituire la mia sacca da gamba?

R: Seguire sempre i consigli per l'uso del proprio operatore sanitario. Quando la sacca da gamba è danneggiata o visibilmente sporca, è giunto il momento di sostituirla.

D: Con quale frequenza devo svuotare la mia sacca da gamba?

R: Lavarsi sempre le mani prima e dopo lo svuotamento della sacca da gamba. È necessario svuotare la sacca da gamba direttamente nella toilette o in un contenitore quando è quasi piena, oppure prima se comporta un disagio a

contatto con la gamba. Per evitare il rischio di introdurre infezioni o batteri all'interno della sacca da gamba, assicurarsi che il rubinetto non entri in contatto con il sedile o la tazza della toilette.

D: Che cosa devo fare se la sacca da gamba non si riempie di urina?

R: Se si nota che la sacca per urina non riesce a riempirsi normalmente, il tubo della sacca da gamba potrebbe essere attorcigliato o piegato. Verificare se il tubo è attorcigliato o piegato e in tal caso raddrizzare il tubo. Se la causa non è attribuibile al tubo, consultare il proprio operatore sanitario. Sono disponibili sacche di drenaggio con tubi anti-attorcigliamento, tra cui le sacche da gamba Conveen® Security+.

D: Come devo conservare le sacche?

R: Si consiglia di conservare le sacche di drenaggio chiuse in un luogo pulito, fresco e al riparo da fonti luminose.

D: Come e dove devo smaltire le mie sacche da notte?

R: Si consiglia di avvolgere le sacche utilizzate nella carta di giornale o in un sacchetto di plastica prima di gettarle nella spazzatura. Non gettare le sacche nella toilette.

