




MOPEDIA®

MP300

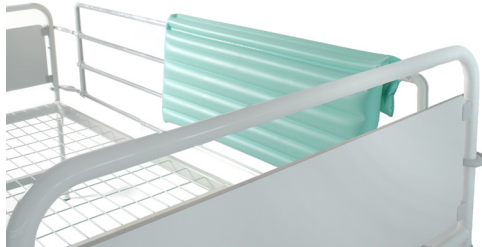


Kit

MP302



MP303

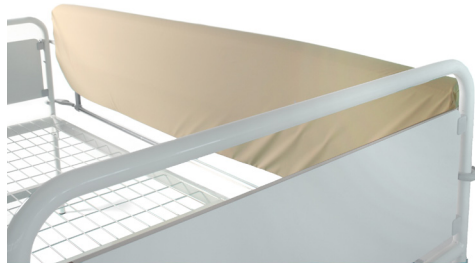

PARASPONDE

MANUALE D'ISTRUZIONE



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

INDICE

1. Introduzione	pag.3
2. Destinazione d'uso	pag.3
3. Dichiarazione di conformità CE	pag.3
4. Avvertenze generali	pag.3
5. Parasponde - MP300 - MP302/303	pag.4
6. MP300 - Parasponde ad aria in PVC	pag.4
6.1 Descrizione generale	pag.4
6.2 Caratteristiche tecniche	pag.4
6.3 Modalità d'uso	pag.4
6.4 Pulizia	pag.4
6.5 Avvertenze e precauzioni	pag.4
7. MP302/303 - Parasponde in poliuretano	pag.4
7.1 Descrizione generale	pag.4
7.2 Caratteristiche tecniche	pag.4
7.3 Modalità d'uso	pag.5
7.4 Pulizia	pag.5
7.5 Avvertenze e precauzioni	pag.5
8. Manutenzione	pag.5
8. Condizioni di smaltimento	pag.5
10. Garanzia	pag.6
10.1 Clausole esonerative	pag.6

Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. Introduzione

Grazie per aver scelto un dispositivo della linea MOPEDIA by Moretti. I dispositivi Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

2. Destinazione d'uso

I parasponde MOPEDIA by Moretti sono destinati alla protezione del paziente critico da possibili lesioni accidentali contro le sponde del letto.



- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

3. Dichiarazione di conformità CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia dei materassi è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche.

A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE.**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I.
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

4. Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Conservare ed utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Si consiglia l'uso ad un solo utente
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili

5. Parasponde - MP300 - MP302/303

MP300 - Parasponde ad aria in PVC

MP302/ MP303 - Parasponde in poliuretano espanso

6. MP300 - Parasponda ad aria

6.1 Descrizione generale

Realizzato in PVC

6.2 Caratteristiche tecniche

Dimensioni: **cm90x35x3,5h**

6.3 Modalità d'uso

Appoggiare il dispositivo alla sponda del letto e fissare con il velcro.

6.4 Pulizia

Si consiglia il lavaggio a mano o in lavatrice con acqua e saponi neutri a temperatura di 40° C.

6.5 Avvertenze e precauzioni

Si consiglia l'uso ad un solo utente.

- Il dispositivo RP300 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale utilizzo
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali

7. MP302/303 - Parasponde in poliuretano espanso con applicazione ad incastro

7.1 Descrizione generale

Il parasponde MP302-303 viene realizzato in poliuretano espanso a cellule aperte, sagomato, densità 30 Kg./m3, con fodero di rivestimento in Politex, amovibile mediante zip su tre lati con doppio cursore.

Altre caratteristiche proprie del poliuretano espanso

- è stato prodotto all'origine senza l'impiego di C.F.C. (clorofluorocarburi)
- non contiene lattice (Latex free)
- trattamento antimicotico ed antibatterico
- classe 1 di reazione al fuoco (norma tecnica UNI 9175)

Il fodero di rivestimento è realizzato in Politex, tessuto in spalmato di poliuretano con le seguenti caratteristiche:

- a) impermeabile ai liquidi,
- b) permeabile ai vapori,
- c) bielastico,
- d) antibatterico, antimicotico trattamento Sanitized
- e) latex free (anallergico)
- f) classe 1 di reazione al fuoco (UNI 9177 Metodo di Prova: UNI 8457 e UNI 9174).

7.2 Caratteristiche tecniche

MP302 Dimensioni: **cm90x35x3,5h**

MP303 Dimensioni: **cm190x35x3,5h**

7.3 Modalità d'uso

Incastrare dall'alto il dispositivo con il lato lungo rivolto verso il letto.

7.4 Pulizia

INTERNO: si consiglia il lavaggio con acqua e detersivi con l'accorgimento di introdurre nella lavatrice lo stesso arrotolato e legato. La strizzatura può essere eseguita sia con mangano sia in centrifuga a bassa velocità. L'asciugatura può avvenire in una camera, non soleggiata, a correnti d'aria o con stufa a circolazione d'aria (temperatura massima 70° C.). Trattamento in autoclave con vapore acqueo saturo a temperatura max. di 100° C. per massimo dieci minuti.

7.5 Avvertenze e precauzioni

Si consiglia l'uso ad un solo utente.

- I dispositivi RP302/303 devono essere conservati e utilizzati lontano da fiamme libere e fonti di calore
- I dispositivi devono essere sanificati prima dell'eventuale utilizzo
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali

ESTERNO: Il fodero è lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° C con saponi o detersivi neutri. Non stirare.

8. Manutenzione

I dispositivi della linea LEVITAS by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

9. Condizioni di smaltimento

Condizioni di smaltimento generali:

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

10. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

10.1 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY



Distribuito da / Distributed by:

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com