



MOPEDIA

SOLLEVATORE IDRAULICO

RP800 - attuatore IDRAULICO portata 150Kg

SOLLEVATORI ELETTRICI

RP805 - attuatore LINAK portata 150Kg

RP806 - attuatore HIWIN portata 150Kg

RP807 - attuatore LINAK Jumbo Home portata 150Kg

RP810 - attuatore LINAK portata 180Kg

RP811 - attuatore HIWIN portata 180Kg

VERTICALIZZATORE

RP815 - attuatore LINAK portata 150Kg

MANUALE DI ISTRUZIONI



MORETTI

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO

INDICE

CODICI MODELLI	pag.3
INTRODUZIONE	pag.3
DESTINAZIONE D'USO	pag.3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3-4
DIMENSIONI	pag.4-5
DESCRIZIONE DELLE PARTI	pag.5-6-7
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOLLEVATORI	pag.8
Struttura RP800 (idraulico)	pag.8
Struttura RP805-806-807-810-811 (elettrici)	pag.8
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT ELETTRICI SOLLEVATORI	pag.8
Kit elettrico RP805-810	pag.8-9
Kit elettrico RP807	pag.9
Kit elettrico RP806-811	pag.9
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VERTICALIZZATORE RP815	pag.10-11
ISTRUZIONI D'USO SOLLEVATORI	pag.10
Sollevatore RP800 (idraulico)	pag.10-11
Sollevatori RP805-810 (elettrici)	pag.11-12
Sollevatore RP807 (elettrico)	pag.12
Sollevatori RP806-811 (elettrici)	pag.13-14
ISTRUZIONI D'USO VERTICALIZZATORE RP815	pag.14-15
FOTO ILLUSTRATIVE	pag.16-17-18-19-20
AVVERTENZE	pag.21
PULIZIA	pag.21
MANUTENZIONE	pag.21
PARTI DI RICAMBIO	pag.21
CONDIZIONI DI SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI E DELLE BATTERIE	pag.21-22
GARANZIA	pag.23

Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24 / 02/ 97 n. 46
attuazione della direttiva CEE 93 / 42 e successive modifiche

CODICI

SOLLEVATORE IDRAULICO

RP800 - attuatore IDRAULICO portata 150Kg

SOLLEVATORI ELETTRICI

RP805 - attuatore LINAK portata 150Kg

RP806 - attuatore HIWIN portata 150Kg

RP807 - attuatore LINAK Jumbo Home portata 150Kg

RP810 - attuatore LINAK portata 180Kg

RP811 - attuatore HIWIN portata 180Kg

VERTICALIZZATORE

RP815 - attuatore LINAK portata 150Kg

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un sollevatore/verticalizzatore della linea **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A. Il loro design e la loro qualità garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed affidabilità. I sollevatori/verticalizzatori **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A. sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico e corretto. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il sollevatore/verticalizzatore. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTINAZIONE D'USO

I sollevatori/verticalizzatori della linea **MOPEDIA** sono destinati al sollevamento ed al trasferimento di persone con difficoltà motorie, attraverso l'aiuto di un accompagnatore che aziona i comandi. Non possono essere usati da una persona singola. La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE


La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia **SOLLEVATORI/VERTICALIZZATORI** sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui **DISPOSITIVI MEDICI**. A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della presente dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**.
4. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**.
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.


7. NON E' CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
8. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

DIMENSIONI



RP800

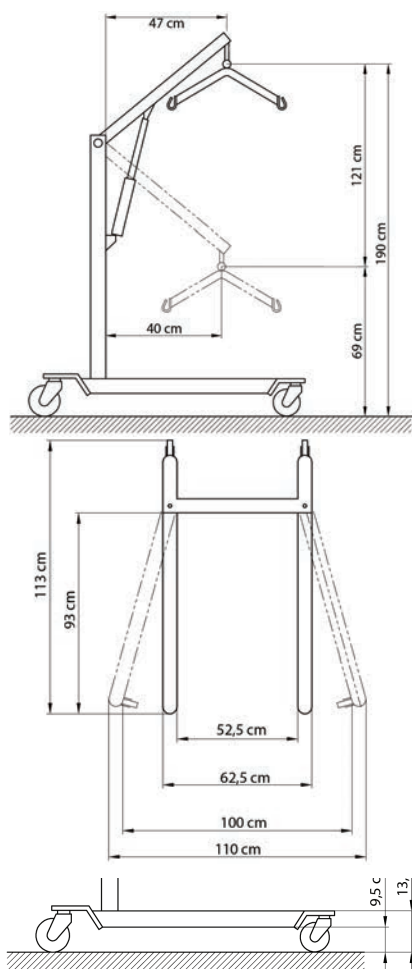

RP805 - RP806 - RP807 - RP810 - RP811

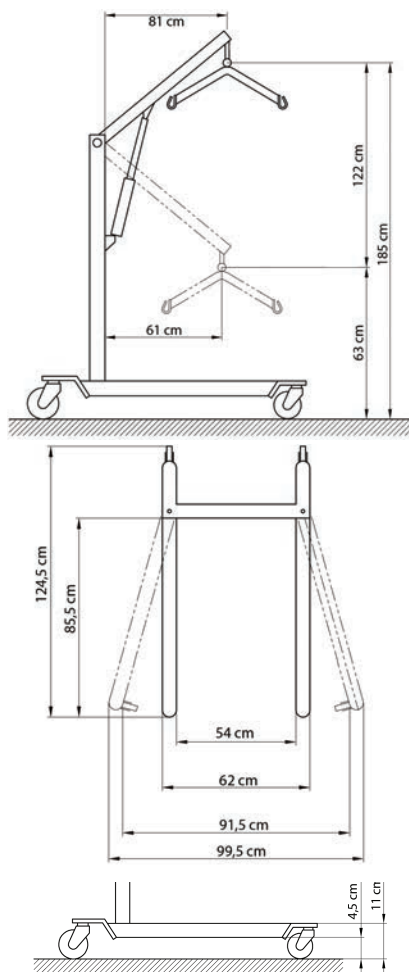

RP815

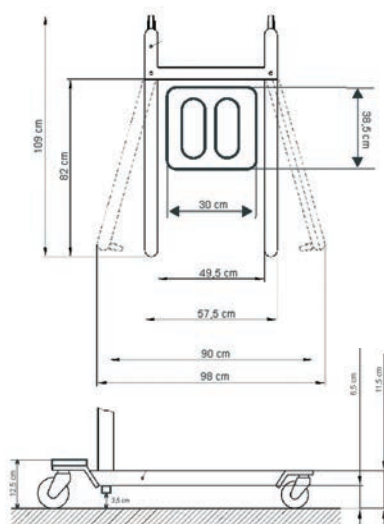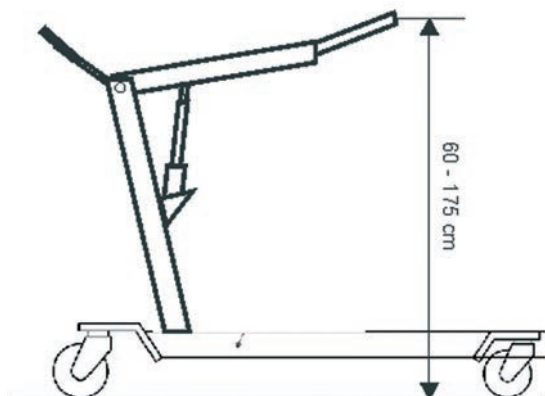

DESCRIZIONE DELLE PARTI




**Struttura per
RP800**

- A** - n.1 base con ruote
- B** - n.1 colonna con braccio e attuatore idraulico
- C** - n.2 maniglie
- D** - n.1 leva
- E** - n.1 gancio a due bracci
- F** - n.1 imbracatura
- G** - n.1 chiave per assemblaggio



**Struttura per
RP805-806-807-810-811**

- A** - n.1 base con ruote
- B** - n.1 colonna con braccio
- C** - n.2 maniglie
- D** - n.1 leva
- E** - n.1 gancio a due bracci
- F** - n.1 imbracatura
- G** - n.4 viti a brugola M6x10mm
- H** - n.2 viti M5x80mm (utilizzare solo per RP807)
- I** - n.2 chiavi a brugola per assemblaggio

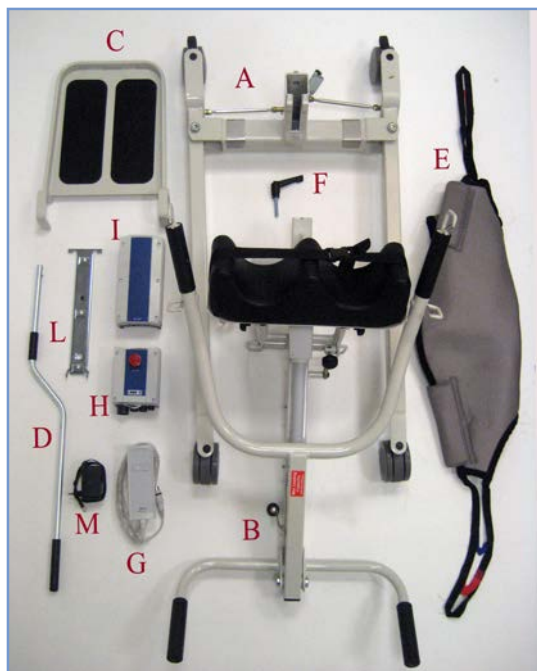

Struttura per RP815

- A** - n.1 base con ruote
- B** - n.1 colonna con braccio e attuatore elettrico
- C** - n.1 pedana
- D** - n.1 leva
- E** - n.1 imbracatura
- F** - n.1 maniglia filettata per colonna
- G** - n.1 telecomando LINAK
- H** - n.1 centralina LINAK
- I** - n.1 batteria LINAK
- L** - n.1 staffa per batteria LINAK
- M** - n.1 adattatore caricabatterie



Kit elettrico per RP805 - 810

- A** - n.1 staffa per batteria LINAK
- B** - n.1 telecomando LINAK
- C** - n.1 adattatore caricabatteria
- D** - n.1 batteria LINAK
- E** - n.1 centralina LINAK
- F** - n.1 attuatore LINAK da 150Kg (solo RP805)
- G** - n.1 attuatore LINAK da 180Kg (solo RP810)



**Kit elettrico per
RP806 - 811**

- A** - n.1 telecomando HIWIN
- B** - n.1 adattatore caricabatterie
- C** - n.1 cavo per adattatore caricabatterie
- D** - n.1 batteria HIWIN
- E** - n.1 centralina HIWIN
- F** - n.1 attuatore HIWIN da 150Kg (solo RP806)
- G** - n.1 attuatore HIWIN da 180Kg (solo RP811)



**Kit elettrico per
RP807**

- A** - n.1 attuatore LINAK da 150Kg
- B** - n.1 telecomando LINAK
- C** - n.1 batteria LINAK Jumbo Home
- D** - n.1 cavo per attuatore LINAK
- E** - n.1 fermo in plastica
- F** - n.1 tappo in plastica
- G** - n.2 viti M5x10mm
- H** - n.1 copertura in plastica
- I** - n.1 adattatore caricabatterie

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO STRUTTURA

PER SOLLEVATORE RP800

1. Rimuovere la molla di sicurezza dal perno fissante della base, quindi sfilare il perno
2. Rimuovere i due bulloni esagonali M8 dalla colonna
3. Inserire la colonna con la pompa idraulica nella base facendo attenzione a porre il braccio di sollevamento nella stessa direzione delle gambe della base (fig.1)
4. Inserire nuovamente il perno fissante bloccandolo con la molla di sicurezza, quindi avvitarlo nuovamente i due bulloni esagonali precedentemente tolti (fig.2)
5. Avvitare le due maniglie nella colonna stringendo il controdado di bloccaggio (fig.3)
6. Inserire la leva per l'apertura della base facendo attenzione a far scattare nella corretta posizione la clip di bloccaggio (fig.4)
7. Inserire il bilanciante nell'apposito gancio ad "U" situato nella parte terminale del braccio di sollevamento (fig.5).
8. A questo punto il sollevatore è correttamente assemblato e pronto all'uso

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO STRUTTURA

PER SOLLEVATORI RP805-806-807-810-811

1. Rimuovere i bulloni di fissaggio dalla base e dalla colonna
2. Inserire la colonna nell'apposita cavità rettangolare sulla base facendo attenzione a porre il braccio di sollevamento nella stessa direzione delle gambe della base (fig.6)
3. Avvitare nuovamente i bulloni per bloccare la colonna sulla base, ponendo quello lungo nel foro superiore e quello più corto nel foro inferiore (fig.7)
4. Inserire le maniglie nei relativi supporti e bloccarle con le 4 viti corte messe a disposizione (fig.8)
5. Inserire la leva per l'apertura della base facendo attenzione a far scattare nella corretta posizione la clip di bloccaggio (fig.9)
6. Inserire il bilanciante nell'apposito gancio ad "U" situato nella parte terminale del braccio di sollevamento (fig.10).
7. A questo punto la struttura è correttamente assemblata, per assemblare il relativo kit elettrico seguire le ulteriori istruzioni relative al tipo specifico di sollevatore scelto.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL KIT ELETTRICO

DEL MODELLO RP 805-810

(attuatori LINAK portata 150 e 180 Kg)

1. Rimuovere i due bulloni predisposti sul braccio della colonna per il fissaggio dell'attuatore
2. Inserire l'attuatore e bloccarlo con i due bulloni precedentemente rimossi. Coprire le teste dei dadi con l'apposito cappuccio in plastica (fig.11)
3. Fissare la staffa di supporto della centralina alla colonna utilizzando le due viti piccole testa a croce (di serie sulla colonna sono presenti 3 viti ma ne dovranno essere utilizzate solo 2).

N.B. SULLA COLONNA E SULLA STAFFA SONO PRESENTI 3 FORI, MA PER QUESTA OPERAZIONE UTILIZZARE SOLTANTO IL PRIMO E IL SECONDO FORO PARTENDO DALL'ALTO (FIG.12)

4. Fissare la centralina LINAK sulla staffa avendo cura di inserirla correttamente nelle guide inferiori e bloccarla con la relativa piccola vite a brugola (fig.13)
5. Inserire la batteria LINAK sulla parte superiore della centralina, facendo combaciare la parte

- inferiore e poi spingerla verso la staffa stessa fino a far scattare il gancio di sicurezza in alto (fig.14)
6. Collegare il connettore elettrico dell'attuatore all'ingresso "1" presente sulla centralina spingendo energicamente fino ad inserimento completo (fig.15)
 7. Collegare il connettore elettrico del telecomando all'ingresso grande presente sulla centralina posizionando in modo corretto il dente di guida e spingere energicamente fino ad inserimento completo (fig.15)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL KIT ELETTRICO DEL MODELLO RP807

(attuatore LINAK Jumbo Home portata 150 Kg)

1. Rimuovere i due bulloni predisposti sul braccio della colonna per il fissaggio dell'attuatore
2. Inserire l'attuatore e bloccarlo con i due bulloni precedentemente rimossi. Coprire le teste dei dadi con l'apposito cappuccio in plastica (fig.11)
3. Fissare il pacco completo della batteria direttamente sulla colonna del sollevatore utilizzando le due viti lunghe M5x80mm (fig.16)

N.B. PER ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE DA PRIMA AVVITARE DI POCCHI MILLIMETRI ENTRAMBE LE VITI E SUCCESSIVAMENTE STRINGERLE DI PARI PASSO FINO AL BLOCCAGGIO COMPLETO

4. Collegare una estremità della prolunga elettrica al connettore dell'attuatore rispettando il verso del dente di guida e bloccare il tutto con il fermo di sicurezza in plastica (fig.17)
5. Collegare l'altra estremità della prolunga al pacco batteria sul relativo ingresso di destra (fig.18)
6. Collegare il connettore elettrico del telecomando al relativo ingresso sulla centralina rispettando il verso del dente di guida (fig.18)
7. Posizionare il cappuccio di chiusura sull'ingresso della centralina rimasto libero e inserire il coperchio di protezione avvitandolo con le due viti piccole M4x10mm (fig.19)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL KIT ELETTRICO DEI MODELLI RP806-811

(attuatori HIWIN 150-180Kg)

1. Rimuovere i due bulloni predisposti sul braccio della colonna per il fissaggio dell'attuatore
2. Inserire l'attuatore e bloccarlo con i due bulloni precedentemente rimossi. Coprire le teste dei dadi con l'apposito cappuccio in plastica (fig.11)
3. Fissare la staffa di supporto della centralina alla colonna utilizzando le due viti piccole testa a croce (di serie sulla colonna sono presenti 3 viti ma ne dovranno essere utilizzate solo 2).

N.B. SULLA COLONNA E SULLA STAFFA SONO PRESENTI 3 FORI, MA PER QUESTA OPERAZIONE UTILIZZARE SOLTANTO IL PRIMO E IL SECONDO FORO PARTENDO DALL'ALTO (FIG.20)

4. Applicare la batteria allineando i perni posteriori con i fori sulla slitta della centralina, quindi inserirla verso il basso facendo attenzione a fare scattare il blocco di sicurezza giallo (fig.21)
5. Collegare il connettore elettrico dell'attuatore nella rispettiva connessione centrale in basso sulla centralina contrassegnata con "1" spingendo energicamente fino ad inserimento completo (fig.22)
6. Collegare il connettore elettrico del telecomando nell'ingresso di sinistra della centralina contrassegnato con "KP" facendo attenzione a rispettare il verso di inserimento del dente di guida. Spingere energicamente fino ad inserimento completo (fig.22).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL VERTICALIZZATORE **RP815**

1. Inserire la colonna nel supporto della base posizionando il braccio di sollevamento nella stessa direzione delle gambe e bloccare tutta la struttura con la maniglia e il bullone esagonale posteriore M12x20 mm (fig.23)
2. Sollevare il cuscino di appoggio delle gambe e bloccarlo con la relativa manopola (fig.24)
3. Posizionare il piatto di appoggio per i piedi sulla base (fig.25)
4. Collegare l'attuatore al braccio di sollevamento tramite il perno e bloccarlo con la molla di sicurezza (fig.26)

N.B. NELLA PARTE INFERIORE L'ATTUATORE È GIÀ MONTATO SULLA STRUTTURA E NON NECESSITA DI ALCUNA OPERAZIONE.

5. Inserire la leva per l'apertura della base facendo attenzione a far scattare nella corretta posizione la clip di bloccaggio (fig.27)
6. Fissare la staffa di supporto della centralina alla colonna utilizzando le 3 viti testa a croce predisposte sulla colonna stessa (fig.28)
7. Fissare la centralina LINAK sulla staffa avendo cura di inserirla correttamente nelle guide inferiori e bloccarla con la relativa piccola vite a brugola (fig.13)
8. Inserire la batteria LINAK sulla parte superiore della centralina, facendo combaciare la parte inferiore e poi spingerla verso la staffa stessa fino a far scattare il gancio di sicurezza in alto. (fig.14)
9. Collegare il connettore elettrico dell'attuatore all'ingresso "1" presente sulla centralina spingendo energicamente fino ad inserimento completo (fig.15)
10. Collegare il connettore elettrico del telecomando all'ingresso grande presente sulla centralina posizionando in modo corretto il dente di guida e spingere energicamente fino ad inserimento completo (fig.15)

ISTRUZIONI D'USO DEL SOLLEVATORE **RP800**

1. Prima di sollevare allargare le gambe della base fino alla massima ampiezza possibile tirando leggermente la leva di apertura verso di voi e bloccandola nella posizione di apertura (fig.29)
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori (fig.30)
3. Mantenere il paziente centrato tra le gambe della base e sempre rivolto verso chi lo assiste
4. Agganciare con cura le cinture dell'imbracatura al bilanciante
5. Assicurarci che la valvola sulla pompa idraulica sia completamente chiusa (per fare questo ruotare nella direzione CLOSE) (fig.32)
6. Azionare la leva di pompaggio per iniziare il sollevamento
7. **CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DELPAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!**
8. Sollevare il paziente all'altezza necessaria, mantenendolo in posizione frontale verso chi lo assiste (fig.31)
9. Sbloccare le ruote posteriori (fig.30) e trasferire il paziente
10. Prima di iniziare la discesa del paziente bloccare nuovamente le ruote posteriori
11. Iniziare la discesa del paziente ruotando lentamente la valvola sulla pompa idraulica nella direzione (OPEN) (fig.32)

N.B. PER EFFETTUARE UNA DISCESA LENTA APRIRE LEGGERMENTE LA VALVOLA,

MENTRE SE SI VUOLE AUMENTARE LA VELOCITÀ RUOTARLA MAGGIORMENTE SEMPRE NELLA DIREZIONE (OPEN)

12. CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!

DURANTE LA DISCESA ASSISTERE SEMPRE IL PAZIENTE PER CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA!

ISTRUZIONI D'USO
DEL SOLLEVATORE RP805-810

PRIMA DI UTILIZZARE IL SOLLEVATORE ELETTRICO SI RACCOMANDA DI CARICARE LE BATTERIE PER CIRCA 6 ORE

1. Prima di sollevare allargare le gambe della base fino alla massima ampiezza possibile tirando leggermente la leva di apertura verso di voi e bloccandola nella posizione di apertura (fig.33)
2. Bloccare le ruote posteriori (fig.34)
3. Mantenere il paziente centrato tra le gambe della base e sempre rivolto verso chi lo assiste
4. Agganciare con cura le cinture dell'imbracatura al bilanciere
5. Utilizzare il tasto freccia in alto per sollevare il paziente (fig.35)
6. **CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO**
7. Sollevare il paziente all'altezza necessaria , mantenendolo in posizione frontale verso chi lo assiste (fig.36)
8. Sbloccare le ruote posteriori e trasferire il paziente
9. Prima di iniziare la discesa del paziente bloccare nuovamente le ruote posteriori
10. Per far discendere il paziente azionare il pulsante freccia in basso (fig.35)
11. **CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!**

DURANTE LA DISCESA ASSISTERE SEMPRE IL PAZIENTE PER CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA!

STOP DI EMERGENZA

Sulla centralina è presente un pulsante rosso "STOP" che se premuto disattiva immediatamente tutti i comandi. Per ripristinare il funzionamento ruotare in senso orario il tasto rosso e farlo riscattare in fuori (fig.15)

DISCESA DI EMERGENZA

Sulla centralina sotto al pulsante STOP è presente un piccolo pulsante chiamato "Emergency" che serve per un abbassamento di emergenza nel caso di un guasto al telecomando. (fig.15)

N.B. PER UTILIZZARE QUESTO PULSANTE SERVIRSI DI UN OGGETTO CON LA PUNTA PICCOLA TIPO UNA PENNA!

SCARICO RAPIDO SULL'ATTUATORE (solo modello RP810)

IN CASO DI UTILIZZO DELLA DISCESA DI EMERGENZA ASSICURARSI CHE QUESTA VENGA EFFETTUATA IN CONDIZIONI DI TOTALE SICUREZZA PER IL PAZIENTE.

Sul sollevatore **RP810** portata 180 Kg sull'attuatore è presente uno sgancio rapido di colore rosso per attivare un abbassamento di emergenza del paziente nel caso in cui la parte elettrica non funzioni più correttamente, o nel caso in cui il paziente necessiti di un soccorso immediato. Per attivare l'abbassamento di emergenza sollevare il relativo dispositivo di colore rosso (fig.37)

N.B. LO SGANCIO RAPIDO DI EMERGENZA HA UN FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE MECCANICO ED È TARATO PER FUNZIONARE CON UN PESO MINIMO APPLICATO, QUINDI SE LO SI PROVA SENZA PAZIENTE APPLICATO AL BILANCIERE, QUESTO NON FUNZIONERÀ!

COME RICARICARE LE BATTERIE

- Collegare l'adattatore alla presa di rete e quindi all'ingresso della centralina (fig.15), oppure scollegare la batteria e collegare l'adattatore direttamente sull'ingresso della batteria (fig.38)
- Prima di procedere con l'uso del sollevatore ricordarsi di scollegare sempre l'adattatore per ricaricare le batterie!
- Caricare le batterie per almeno 6 ore prima di utilizzare il sollevatore!
- E'possibile ricaricare le batterie anche utilizzando il caricabatterie da parete (OPTIONAL)

ISTRUZIONI D'USO

DEL SOLLEVATORE **RP807**

PRIMA DI UTILIZZARE IL SOLLEVATORE ELETTRICO SI RACCOMANDA DI CARICARE LE BATTERIE PER CIRCA 6 ORE

1. Prima di sollevare allargare le gambe della base fino alla massima ampiezza possibile tirando leggermente la leva di apertura verso di voi e bloccandola nella posizione di apertura (fig.33)
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori (fig.34)
3. Mantenere il paziente centrato tra le gambe della base e sempre rivolto verso chi lo assiste
4. Agganciare con cura le cinture dell'imbracatura al bilanciere
5. Utilizzare il tasto "sollevamento" per sollevare il paziente (si accende il led verde di conferma sulla centralina) (fig.39-40)
6. ***CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!***
7. Sollevare il paziente all'altezza necessaria, mantenendolo in posizione frontale verso chi lo assiste (fig.36)
8. Sbloccare le ruote posteriori e trasferire il paziente
9. Prima di iniziare la discesa del paziente bloccare nuovamente le ruote posteriori
10. Per far discendere il paziente azionare il tasto "abbassamento" (si accende il led verde di conferma sulla centralina) (fig.39-40)
11. ***CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!***

DURANTE LA DISCESA ASSISTERE SEMPRE IL PAZIENTE PER CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA!

STOP DI EMERGENZA

Sulla centralina è presente un pulsante rosso "STOP" che se premuto disattiva immediatamente tutti i comandi. Per ripristinare il funzionamento ruotare in senso orario il tasto rosso e farlo

riscattare in fuori (fig.40)

DISCESA DI EMERGENZA

Sulla centralina sotto ai due led è presente un pulsante con la freccia rivolta verso il basso che serve per un abbassamento di emergenza nel caso di un guasto al telecomando. (fig.40)

COME RICARICARE LE BATTERIE

- Collegare l'adattatore alla presa di rete e quindi all'ingresso della centralina (fig.18)

N.B. QUANDO LA BATTERIA È IN CARICA SI ACCENDE UN LED DI COLORE ARANCIO SUL FRONTALINO DELLA BATTERIA STESSA E TUTTI I COMANDI SONO AUTOMATICAMENTE DISATTIVATI (FIG.40)

- Prima di procedere con l'uso del sollevatore ricordarsi di scollegare sempre l'adattatore per ricaricare le batterie!
- Caricare le batterie per almeno 6 ore prima di utilizzare il sollevamalai

ISTRUZIONI D'USO

DEL SOLLEVATORE RP806-811

PRIMA DI UTILIZZARE IL SOLLEVATORE ELETTRICO SI RACCOMANDA DI CARICARE LE BATTERIE PER CIRCA 6 ORE

1. Prima di sollevare allargare le gambe della base fino alla massima ampiezza possibile tirando leggermente la leva di apertura verso di voi e bloccandola nella posizione di apertura (fig.33)
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori (fig.34)
3. Mantenere il paziente centrato tra le gambe della base e sempre rivolto verso chi lo assiste
4. Agganciare con cura le cinture dell'imbracatura al bilanciere
5. Utilizzare il tasto "freccia in alto" per sollevare il paziente (fig.41)
6. **CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!**
7. Sollevare il paziente all'altezza necessaria, mantenendolo in posizione frontale verso chi lo assiste (fig.36)
8. Sbloccare le ruote posteriori e trasferire il paziente
9. Prima di iniziare la discesa del paziente bloccare nuovamente le ruote posteriori
10. Per far discendere il paziente azionare il tasto "freccia in basso" (fig.41)
11. **CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DEL PAZIENTE DURANTE TUTTO L'ARCO DI MOVIMENTO!**

DURANTE LA DISCESA ASSISTERE SEMPRE IL PAZIENTE PER CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA!

STOP DI EMERGENZA

Sulla centralina è presente un pulsante rosso "STOP" che se premuto disattiva immediatamente tutti i comandi. Per ripristinare il funzionamento ruotare in senso orario il tasto rosso e farlo riscattare in fuori (fig.42)

COMANDI DI EMERGENZA

Sulla centralina sono presenti due pulsanti (uno con la freccia in su e l'altro con la freccia in giù) che possono essere usati al posto di quelli presenti sul telecomando per eseguire delle operazioni

nel caso in cui il telecomando stesso manifesti dei problemi di funzionamento. (fig.42)

SCARICO RAPIDO SULL'ATTUATORE (solo modello RP811)

In caso di utilizzo della discesa di emergenza assicurarsi che questa venga effettuata in condizioni di totale sicurezza per il paziente. Sul sollevatore **RP811** portata 180 Kg sull'attuatore è presente uno sgancio rapido per attivare un abbassamento di emergenza del paziente nel caso in cui la parte elettrica non funzioni più correttamente, o nel caso in cui il paziente necessiti di un soccorso immediato. Per attivare l'abbassamento di emergenza sollevare il relativo dispositivo ad anello metallico. (fig.43)

N.B. LO SGANCIO RAPIDO DI EMERGENZA HA UN FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE MECCANICO ED È TARATO PER FUNZIONARE CON UN PESO MINIMO APPLICATO, QUINDI SE LO SI PROVA SENZA PAZIENTE APPLICATO AL BILANCIERE, QUESTO NON FUNZIONERÀ!

INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Sul sollevatore mod. **RP806-811** è presente un indicatore a 4 led per lo stato di carica della batteria. Questo indicatore è situato sia sul telecomando che sul frontalino della centralina. Per visualizzare lo stato di carica della batteria dobbiamo necessariamente premere uno dei due pulsanti (freccia sù/freccia giù). Quattro led accesi indicano una carica completa della batteria, mentre un solo led acceso indica che la batteria è scarica e dobbiamo provvedere a ricaricarla. (fig.41) e (fig.42)

COME RICARICARE LE BATTERIE

- Collegare l'adattatore alla presa di rete e quindi all'ingresso della centralina dopo aver tolto il relativo cappuccio di protezione (fig.22)
- Sull'adattatore caricabatteria è presente un led che durante la fase di ricarica è di colore rosso. Caricare la batteria fino a quando il led diventa di colore verde.
- Prima di procedere con l'uso del sollevatore ricordarsi di scollegare sempre l'adattatore per ricaricare le batterie!
- Caricare le batterie per almeno 6 ore prima di utilizzare il sollevamalai
- E' possibile ricaricare le batterie anche utilizzando il caricabatterie da parete (OPTIONAL)

ISTRUZIONI D'USO

DEL VERTICALIZZATORE RP815

PRIMA DI UTILIZZARE IL VERTICALIZZATORE ELETTRICO SI RACCOMANDA DI CARICARE LE BATTERIE PER CIRCA 6 ORE

1. Prima di sollevare allargare le gambe della base fino alla massima ampiezza possibile tirando leggermente la leva di apertura verso di voi e bloccandola nella posizione di apertura (fig.44)
2. Posizionarsi correttamente di fronte ad un paziente seduto

N.B. SE IL PAZIENTE DEVE ESSERE ALZATO DA UNA CARROZZINA ASSICURARSI DI AVER FRENATO LE RUOTE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE.

3. Bloccare le ruote posteriori del verticalizzatore (fig.45)
4. Mantenere il paziente centrato tra le gambe della base e sempre rivolto verso chi lo assiste
5. Posizionare i piedi del paziente sulla base e regolare l'altezza e

la profondità del poggiatesta in base alla fisionomia del paziente stesso utilizzando le relative manopole di regolazione (fig.46)

6. Agganciare con cura le cinture dell'imbracatura al braccio del verticalizzatore
7. Far impugnare al paziente le maniglie del verticalizzatore se questo è in grado di farlo
8. Controllare sempre la corretta posizione del paziente durante tutto l'arco di movimento
9. Azionare il tasto freccia in alto per iniziare ad alzare il paziente (fig.35)
10. Alzare il paziente fino alla completa posizione in piedi (fig.47)
11. Sbloccare le ruote e procedere allo spostamento del paziente
12. Riposizionarsi di fronte ad una nuova seduta e ribloccare le ruote del verticalizzatore

N.B. SE IL PAZIENTE DEVE ESSERE SEDUTO SU DI UNA CARROZZINA ASSICURARSI DI AVER FRENATO LE RUOTE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE.

13. Iniziare la discesa del paziente azionando il tasto freccia in basso (fig.35)
14. Controllare sempre la corretta posizione del paziente durante tutto l'arco di movimento

DURANTE LA DISCESA ASSISTERE SEMPRE IL PAZIENTE PER CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA!

STOP DI EMERGENZA

Sulla centralina è presente un pulsante rosso "STOP" che se premuto disattiva immediatamente tutti i comandi. Per ripristinare il funzionamento ruotare in senso orario il tasto rosso e farlo riscattare in fuori (fig.37)

DISCESA DI EMERGENZA





Sulla centralina sotto al pulsante STOP è presente un piccolo pulsante chiamato "Emergency" che serve per un abbassamento di emergenza nel caso di un guasto al telecomando. (fig.38)

N.B. PER UTILIZZARE QUESTO PULSANTE SERVIRSI DI UN OGGETTO CON LA PUNTA PICCOLA TIPO UNA PENNA!

COME RICARICARE LE BATTERIE






- Collegare l'adattatore alla presa di rete e quindi all'ingresso della centralina (fig.15), oppure scollegare la batteria e collegare l'adattatore direttamente sull'ingresso della batteria (fig.38)
- Prima di procedere con l'uso del sollevatore ricordarsi di scollegare sempre l'adattatore per ricaricare le batterie!
- Caricare le batterie per almeno 6 ore prima di utilizzare il sollevatore
- E' possibile ricaricare le batterie anche utilizzando il caricabatterie da parete (OPTIONAL)







FOTO ILLUSTRATIVE



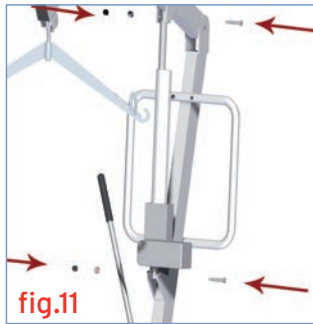
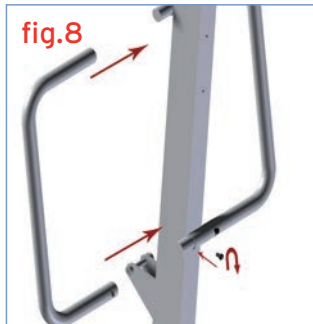
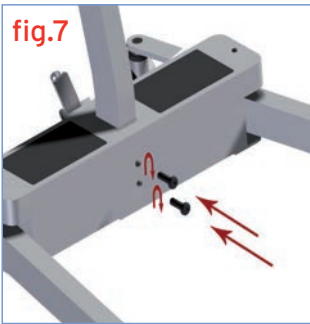
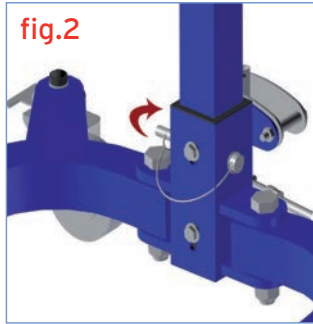








pulsante STOP (per ripristinare ruotare in senso orario)

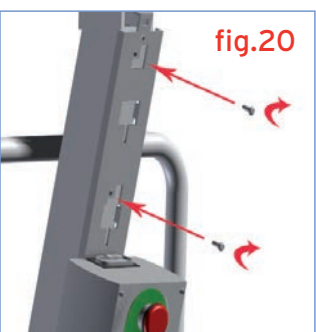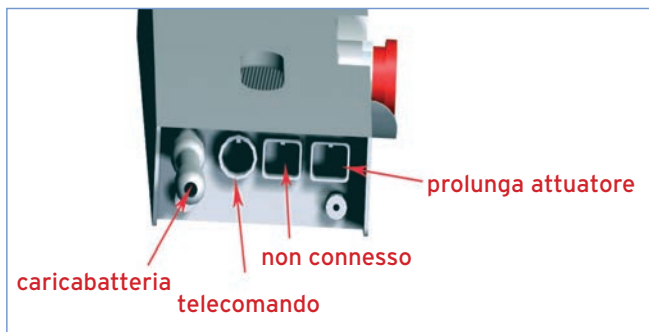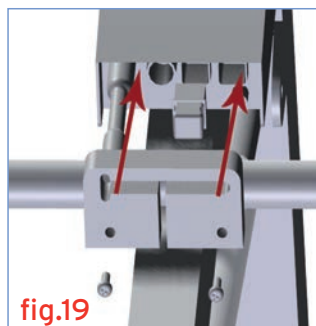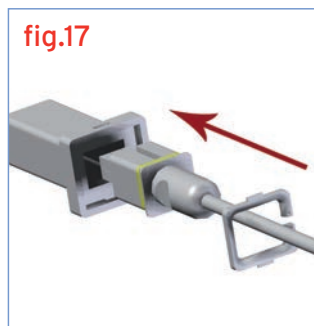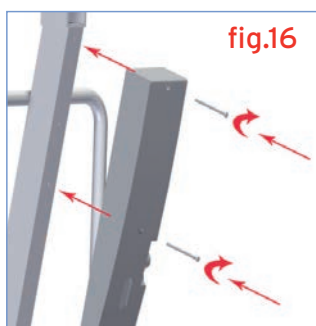

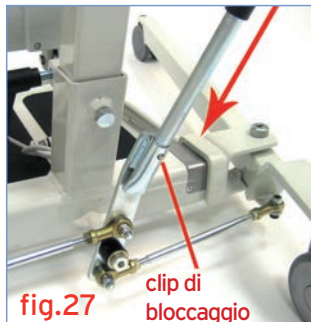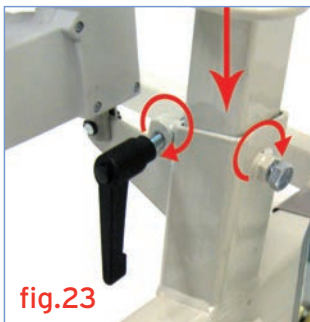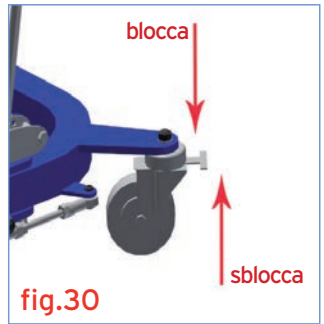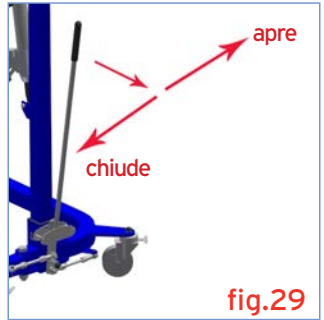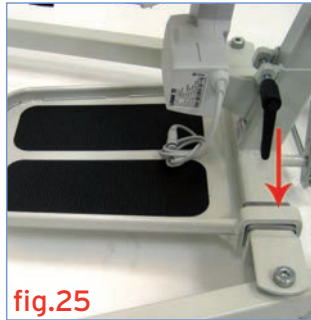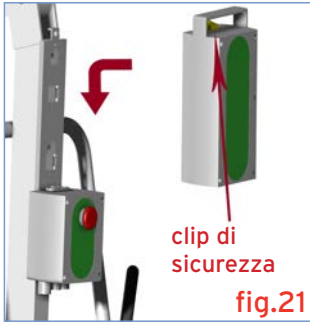

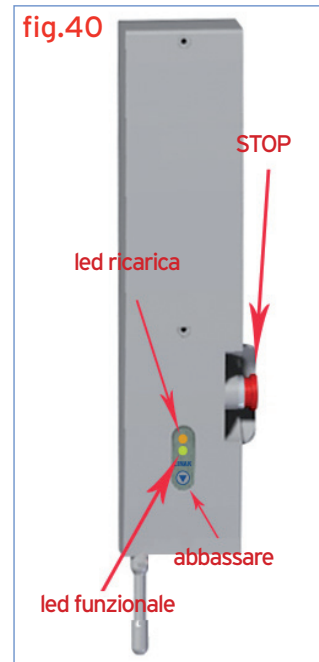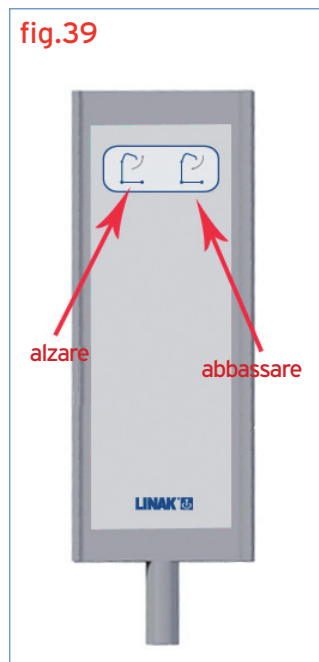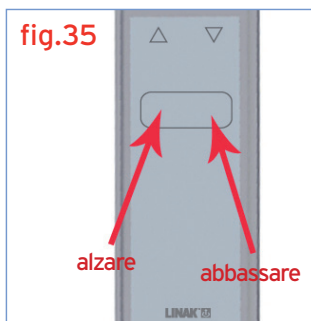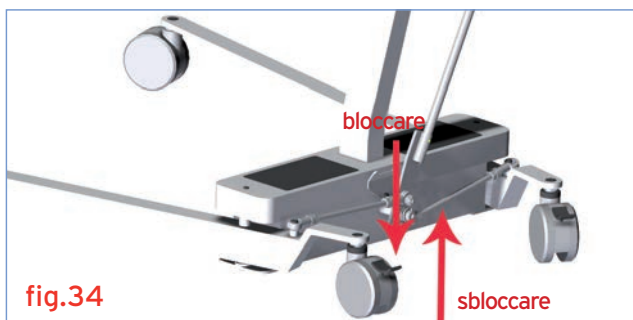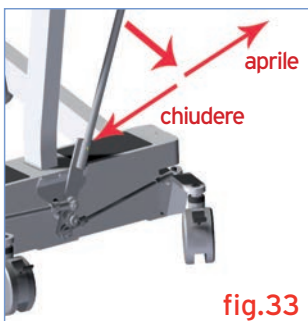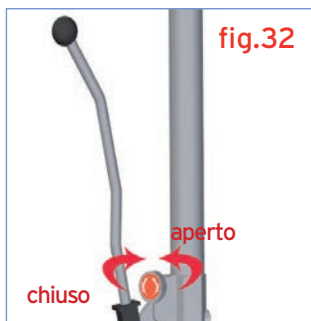

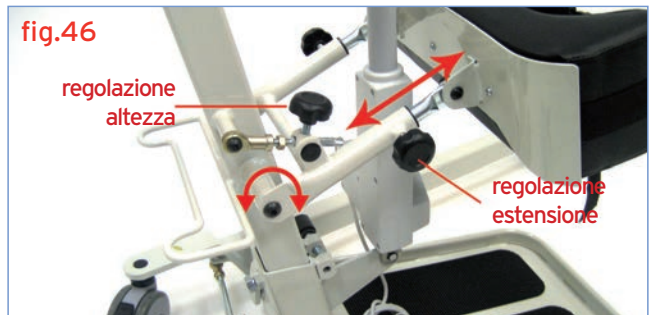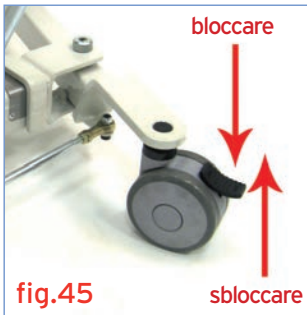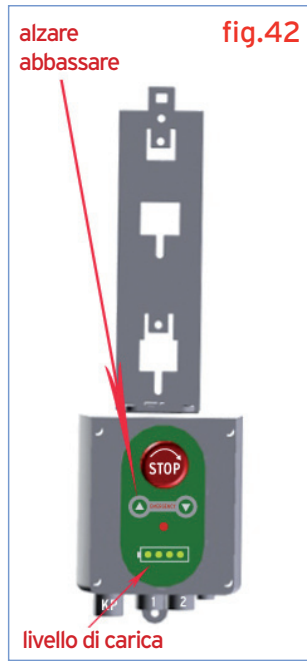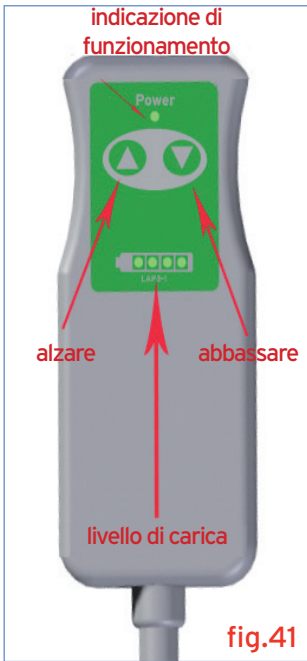

AVVERTENZE

- Il sollevatore è un dispositivo che permette di effettuare brevi trasferimenti di un paziente con difficoltà di movimento come ad esempio da un letto ad una carrozzina o una sedia comoda o viceversa. Il sollevatore non deve essere usato per il trasporto del paziente.
- Durante il sollevamento del malato, assicurarsi che le gambe della base siano aperte il più possibile, che la leva di comando sia bloccata in modo sicuro nella relativa posizione ed i freni delle ruote posteriori siano bloccati.
- Durante il trasferimento evitate di oltrepassare ostacoli che potrebbero provocare un ribaltamento.
- Verificate sempre il buon stato delle imbracature. Non usare imbracature che presentino segni di danneggiamento o di usura.

PULIZIA

Per la pulizia delle imbracature e della struttura utilizzare un soluzione di alcool e sapone neutro in parti uguali miscelati con acqua.

MANUTENZIONE

- E' estremamente importante che il sollevatore sia controllato prima ogni uso:
- In particolare si prega di controllare che tutte le viti e bulloni siano ben stretti.
- Che il sollevatore sia in grado di muoversi liberamente con i freni delle ruote non attivi.
- Verificare i freni delle ruote posteriori per un corretto funzionamento.
- E' molto importante verificare periodicamente che i perni di collegamento e relativi anelli di fermo presenti siano disposti correttamente (i perni collegano l'attuatore in alto e in basso al sollevatore e il bilanciante dove si collega l'imbracatura).
- Le parti meccaniche devono essere lubrificate con un goccio di olio al fine di favorire la scorrevolezza e la resistenza all'usura. In particolare prestare attenzione al dispositivo meccanico per la divaricazione delle gambe del sollevatore. Lubrificare come sopra indicato ogni due o tre mesi.

PARTI DI RICAMBIO

Per le parti di ricambio e gli accessori fare sempre riferimento al catalogo Master MORETTI.

UTILIZZARE SOLO ACCESSORI ORIGINALI MORETTI. IN CASO DIVERSO SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU INCIDENTI CAUSATI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI E DELLE BATTERIE

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO

DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC:



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i

materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE

(Direttiva 2006/66/CE):

Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

GARANZIA

Il prodotto è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com