

Albo Land srl

Via Mastroianni,9  
40013 Castel Maggiore BO (Italy)  
Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877  
P.IVA: 01778301208  
Capitale Sociale €12000 I.V.  
[www.alboland.com](http://www.alboland.com) [info@alboland.com](mailto:info@alboland.com)  
R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

**ALBO** *Land*™  
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF	Albo Land srl	Data diproduzione. Vedi lotto	Ultima modifica. 03/07/2013
034-035-036			
<b>CINTO MOD. 111</b> <b>cod.034/dx,035/sx,036/doppio</b>			
<b>MISURE:</b> DA cm. 80 cm.120 (CON SCATTO OGNI 5 cm.)		<b>COLORE:</b> ECRU'	
<b>COMPOSIZIONE:</b> COTONE 45% POLIESTERE 27% VISCOSA 16% GOMMA 12%.		<b>LAVAGGIO:</b> LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE	
<b>INDICAZIONI:</b> INDICATO PER PAZIENTI CON ERNIA INGUINALE RIDUCIBILE . LA CONTENZIONE DELL'ERNIA E' DATA DALLA PELOTTA INGUINALE .		<b>CONFEZIONE:</b> IN SCATOLA DI CARTONE.	
<b>ISTRUZIONI:</b> PRIMA DI INDOSSARE IL CINTO SI CONSIGLIA UNA ACCURATA PULIZIA DELLA CUTE 1. REGOLARE LA CIRCONFERENZA DELLA CINTURA E DEL SOTTOCOSCIA TRAMITE LA FIBBIA ED I GANCI METALLICI. 2. POSIZIONARE LA PELOTTA NELLA PARTE INTERESSATA RIDUCENDO L'ERNIA NELLA PROPRIA SEDE RESTANDO IN POSIZIONE DISTESA		<b>AVVERTENZE:</b> DISPOSITIVO NON STERILE.SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO.	
<b>CONTROINDICAZIONI:</b> SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.		<b>GARANZIA:</b> IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE.	
034/DX N° progressivo: 138357 GMDM: 47218 CND: Y031206	035/DX N° progressivo: 138357 GMDM: 47218 CND: Y031206	036/DX N° progressivo: 138357 GMDM: 47218 CND: Y031206	  