

<p>REF 062-063-064</p>	<p> Albo Land s.r.l.</p>	<p>Data di produzione Vedi lotto</p>	<p>Ultima modifica 03/07/2013</p>
<p>CINTO 222F cod.062/dx.063/sx.064/doppio tip.I,068/doppio tip.II</p>			
<p>MISURE: da cm. 80 cm.120 (con scatto ogni 5 cm.)</p>		<p>COLORE: ECRU*</p>	
<p>COMPOSIZIONE: COTONE 75% ELASTAM 25%</p>		<p>LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PERCAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.</p>	
<p>INDICAZIONI: INDICATO PER PAZIENTI CON ERNIA INGUINALE RIDUCIBILE . LA CONTENZIONE DELL'ERNIA E' DATA DALLA PELOTTA INGUINALE .</p>		<p>CONFEZIONE: SCATOLA DI CARTONE.</p>	
<p>ISTRUZIONI: PRIMA DI INDOSSARE IL CINTO SI CONSIGLIA UNA ACCURATA PULIZIA DELLA CUTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REGOLARE LA CIRCONFERENZA DELLA CINTURA E DEL SOTTOCOSCIA TRAMITE LA FIBBIA ED I GANCI METALLICI. 2. POSIZIONARE LA PELOTTA NELLA PARTE INTERESSATA RIDUCENDO L'ERNIA NELLA PROPRIA SEDE RESTANDO IN POSIZIONE DISTESA. 		<p>CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE ERNIE.</p>	
<p>AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO</p>		<p>GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE.</p>	
<p>062/DX N° progressivo: 138366 GMDM: 47218 CND: Y031206</p>	<p>063/SX N° progressivo: 138369 GMDM: 47218 CND: Y031206</p>	<p>064/Doppio tipoI N° progressivo: 138371 GMDM: 47218 CND: Y031206</p>	<p>068/Doppio tipoII N° progressivo: 138379 GMDM: 47218 CND: Y031206</p>
<p>  </p>			