

REF 370	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 06/06/2012
CUSCINO VAS			
MISURE: CM.40 X 40 X 5 PESO KG.1 circa.		COLORE: FODERA VELLUTO BLU - PVC ANTISCIVOLO GRIGIO	
COMPOSIZIONE: N°3 LASTRE FORATE SCHIUMA DI SILICONE - FODERA IN VELLUTO DI COTONE -PVC ANTISCIVOLO GRIGIO.		CONFEZIONE: IN SCATOLA.	
LAVAGGIO: SOLO PER LA FODERA: LAVARE A SECCO O A MANO CON ACQUA A 30° E DETERSIVO PER CAPI DELICATI. NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE L'INTERNO SI PUO' LAVARE CON UNA SPUGNA UMIDA E SAPONE NEUTRO		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
ISTRIZIONI: POSIZIONARE IL CUSCINO SULLA SEDUTA DELLA CARROZZELLA O COMODA CON LA PARTE IN PVC ANTISDRUCCIOLO A CONTATTO DEL SEDILE . CONSERVARE IL PRODOTTO SENZA AVVICINARLO A FONTI DI CALORE.DOPO IL LAVAGGIO DELLA FODERA OCCORRE REINSERIRE LE 3 LASTRE FORATE CON LA PARTE GIALLA RIVOLTA VERSO L'ALTO.		INDICAZIONI: INDICATO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE PIAGHE DA DECUBITO PER LUNGODEGENTI E PER DISABILI COSTRETTI ALLA CARROZZELLA. GRAZIE AI FORI MANTIENE UNA BUONA VENTILAZIONE.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO.		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE.	
			