

 <p>Via Ludovico D'Aragona 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>CALZATURA POST-OPERATORIA</p> <p>AMBIDESTRA</p> <p>ACTIVA 8</p>	<p>Rev. 01</p> <p>Ottobre 2010</p>
---	--	------------------------------------

Codice	Misura
A8-3536	35-36
A8-3738	37-38
A8-3940	39-40
A8-4142	41-42
A8-4344	43-44
A8-4546	45-46
A8-4748	47-48

Indicazioni

Calzatura indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

Permette di scaricare il peso del corpo sull'avampiede e una miglior deambulazione anche in presenza di sostanziali alterazioni della forma del piede stesso.

Descrizione

Calzatura alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e con ampio margine per favorire la calzatura.

Tessuto tomaia in materiale anallergico, traspirante e lavabile con bordino per applicazione del puntale di copertura.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo con rinforzo interno in acciaio antiflessione.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici).

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore blu.

Accessori opzionali; copertura Activa C8

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).



Via Ludovico D'Aragona 11
20132 Milano (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

CALZATURA POST-OPERATORIA AMBIDESTRA ACTIVA 8

Rev. 01

Ottobre 2010

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Produttore

INTERMED S.r.l.
Via Ludovico D'Aragona 11
20132 Milano (MI)



Codice CND **Y063303**
N. Repertorio

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE