 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>GRUCCE ASCELLARI</b></p>	<p><b>Rev 01</b></p> <p><b>Ottobre 2010</b></p>
---	---	---

Codice	Descrizione
<b>AD-26N</b>	Grucce ascellari adulto
<b>AD-26X</b>	Grucce ascellari extra adulto
<b>AD-26Y</b>	Grucce ascellari bambino

### **Descrizione**

Grucce ascellari regolabili a 9 differenti livelli d'altezza con appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili. Impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite PVC morbido. Puntali in gomma. La particolarità del dispositivo risiede nel fatto che il puntale di regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio.

### **Portata 120 kg**

### **Precauzioni**


- Consultare sempre il medico o il rivenditore per una corretta regolazione e per un uso adeguato del dispositivo.
- Non conservare all'aperto ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Attenzione: non lasciare il dispositivo in automobile in caso di elevata temperatura esterna.
- Controllare attentamente tutte le parti del dispositivo - clip di fissaggio, tubi, puntali ed impugnature.
- Controllare regolarmente il corretto posizionamento delle clip di fissaggio.
- Impugnare fermamente il dispositivo durante l'utilizzo.
- In caso di perdita d'equilibrio, lasciare prontamente il dispositivo in modo da non cadervi sopra.
- Le parti regolabili di ambedue le stampelle devono essere fissate allo stesso livello d'altezza in modo da garantire stabilità al dispositivo. In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore.
- Spostarsi sempre lentamente ed a piccoli passi per garantire un corretto bilanciamento del peso corporeo e per evitare perdite d'equilibrio.
- Non utilizzare su superfici bagnate o ghiacciate.
- Non utilizzare il dispositivo su gradini.
- Utilizzare il dispositivo soltanto come ausilio per la deambulazione ed evitare qualsiasi altro uso improprio.
- Rispettare sempre la portata massima.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento delle clip di fissaggio e la stabilità sul terreno del dispositivo.
- Non appendere o appoggiare alcun oggetto al dispositivo.
- Non modificare in alcuna parte il dispositivo. In caso di necessità, utilizzare soltanto parti di ricambio originali. Solo personale qualificato è abilitato alla riparazione del dispositivo.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, provvedere sempre alla verifica del dispositivo da parte di personale qualificato.
- Durante l'uso, prestare particolare attenzione a buche e deformazioni del terreno.

### **Dati tecnici**

Codice AD-26Y	Grucce ascellari bambino per altezze utilizzatore da 137 a 157 cm. Regolazione in altezza da 95 a 115 cm.
Codice AD-26N	Grucce ascellari adulto per altezze utilizzatore 157 a 178 cm. Regolazione in altezza da 114 a 134 cm.
Codice AD-26X	Grucce ascellari adulto extra per altezze utilizzatore da 178 a 198 cm. Regolazione in altezza da 133 a 153 cm.

### **Materiali**

La struttura del dispositivo è realizzata in alluminio anodizzato con componenti in materiale plastico e PVC.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>GRUCCE ASCELLARI</b></p>	<p><b>Rev 01</b></p> <p><b>Ottobre 2010</b></p>
---	---	---

### **Preparazione per l'uso**

Solo personale qualificato può procedere all'adeguata regolazione del dispositivo e dare indicazioni circa il suo corretto utilizzo. Un'errata regolazione dell'altezza e degli appoggi sottoascellari o un uso improprio possono determinare una perdita d'efficacia del dispositivo, degli sforzi eccessivi per il paziente e, persino, il rischio di caduta.

Il dispositivo deve essere predisposto all'uso da personale qualificato a seconda delle specifiche necessità di ciascun paziente.

### **Pulizia**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

### **Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice nomenclatore** 12.03.12.003

**Codice CND: Y120312**

**Progressivo di registrazione: 320061**

**Produttore** **INTERMED Srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE