

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>PROTEZIONI PER TALLONE E GOMITO IN VELLO SINTETICO</b></p>	<p><b>Rev 00</b></p> <p><b>Novembre 2010</b></p>
---	---	--

Codice	Descrizione
PA-2	Protezione per tallone
PA-3	Protezione per gomito

**Indicazioni**

Prevenzione del decubito in pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

**Descrizione**

Protezioni per tallone e gomito realizzate in vello sintetico con sistema di fissaggio a velcro.

**Controindicazioni e avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

**Materiali componenti**

Fibra di poliestere 100%

**Pulizia**

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione al paio**

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice Nomenclatore**

**Protezione per tallone 03.33.09.003**

**Protezione per gomito 03.33.09.009**

**Produttore** PHARMA OUEST INDUSTRIES

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE