

Codice	19-15
--------	--------------

Indicazioni

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

Descrizione

Cintura pettorale slim indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento del busto per pazienti seduti su carrozzina, sedia o comoda.

La cintura dalla linea particolarmente confortevole è facile da indossare ed è dotata di cinture regolabili in lunghezza, con chiusure poste sui lati anteriori del busto che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie o comode. La cerniera anteriore di cui è dotata, permette un rapido sgancio in caso di emergenza e una maggiore facilità nell'applicazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

Materiali componenti

<u>Tessuto</u>	<i>vellutino accoppiato (Pam)</i>
<u>Tiranti</u>	<i>poliestere</i>
<u>Imbottitura</u>	<i>Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)</i>
<u>Parte interna</u>	<i>retina traspirante (Pes)</i>

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

Finitura

Cuciture

Pulizia e disinfezione

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri.

Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Codice nomenclatore 12.24.06.139

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y122499

Numero di repertorio: 601214

Produttore ERREGI per INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE