

**ISKIO VISCO
CUSCINO ANATOMICO
VISCOELASTICO**

Codice	Larghezza	Profondità	Altezza
CA-60	40 cm	40 cm	10,5 cm
CA-61	43 cm	43 cm	10,5 cm
CA-62	46 cm	43 cm	10,5 cm
CA-63	50 cm	45 cm	10,5 cm

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Il cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelastica a portata differenziata la quale, grazie alle sue caratteristiche, garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.

L'inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.

Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d (riprodotta in figura) ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Materiali componenti

Mousse viscoelastica

80 kg/m³

Inserto in mousse viscoelastica

80 kg/m³

Fodera in tessuto 3d

poliestere e film di poliuretano

Fodera in tessuto Pharmatex

75% poliuretano e 25% poliestere

Base antiscivolo della fodera

55% poliuretano e 45% poliestere

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Pulizia

Cuscino

A vapore senza aggiunta di formaldeide, disinfettanti o acqua e sapone. Lasciare asciugare all'aria aperta prima di riposizionare la fodera.

Fodera

Lavaggio quotidiano: utilizzare panno morbido e detersivi non aggressivi.

Lavaggio in lavatrice: come indicato di seguito.

**Conservazione**

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



Via Ludovico d'Aragona, 11
20132 Milano (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

ISKIO VISCO CUSCINO ANATOMICO VISCOELASTICO

Rev 00

Dicembre 2013

<u>Confezione</u>	1 pezzo
<u>Garanzia</u>	24 mesi per difetti di fabbricazione ad eccezione delle componenti soggette ad usura.
<u>Codice Nomenclatore</u>	03.33.03.009
<u>Classe 1M reazione al fuoco</u>	EN 597-1 ed EN 597-2
<u>Produttore</u>	PHARMA OUEST INDUSTRIES

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE