

Codice	Descrizione
<b>PRACTICA II 41</b>	Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 41
<b>PRACTICA II 43</b>	Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 43
<b>PRACTICA II 45</b>	Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 45
<b>PRACTICA II 51</b>	Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 51

### **Descrizione ed indicazioni**

Carrozzina ad autospinta con **telaio in acciaio a doppia crociera** e **braccioli desk ribaltabili e regolabili in altezza** indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. **Ruote posteriori piene ad estrazione rapida e ruotini per passaggi stretti. Fascia ferma tallone. Freni regolabili in alluminio. Maniglie di spinta in PU morbido. Colore grigio metallizzato.** Disponibile nelle misure 41, 43, 45 e 51 cm.

### **Materiali componenti**

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	Nylon imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	200 mm con spessore 5 cm in PU morbido
Ruote posteriori	600 mm in PU morbido
Poggiapiedi	Plastica

### **Dati tecnici**

Seduta	Larghezza totale	Altezza seduta da terra	Peso
<b>41 cm</b>	60 cm	51 cm	21 kg
<b>43 cm</b>	62 cm	51 cm	21 kg
<b>45 cm</b>	64 cm	51 cm	21 kg
<b>51 cm</b>	70 cm	51 cm	21 kg

<b>Portata</b>	<b>120 kg</b>
Diametro tubi telaio	22 mm
Diametro tubi crociera	26 mm
Ruote posteriori	24"
Ruote anteriori	8" con spessore 2"

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Manutenzione e pulizia**

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

<b>Freni</b>	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
<b>Tele</b>	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
<b>Ruote</b>	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro.

<b>Mancorrenti</b>	Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
<b>Braccioli</b>	Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
<b>Poggia-piedi</b>	Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
<b>Bulloneria</b>	Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

**Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Garanzia**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

**Codice CND** Y122106  
**Progressivo di registrazione** 315599

**Produttore** INTERMED srl

**Accessori**

**P-20** Pedane elevabili  
**P-25** Sedile wc misura 41-43  
**P-26** Sedile wc misura 45-51  
**P-27** Sedile rigido misura 41-43  
**P-28** Sedile rigido misura 45-51



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE