

**GINOCCHIERA  
IMMOBILIZZATORE 20°**

Misura	Codice	Lunghezza
S	<b>GN-006S</b>	31 cm
M	<b>GN-006M</b>	41 cm
L	<b>GN-006L</b>	51 cm

**Indicazioni**

- Immobilizzazione del ginocchio in posizione flessa in caso di lesioni o fratture.
- Immobilizzazione del ginocchio prima e dopo interventi chirurgici.
- Trattamento di contusioni, slogature e distorsioni del ginocchio.

**Descrizione**

- Struttura composta da tre pannelli rimovibili uniti con sistema velcro facilmente adattabili alla morfologia dell'arto del paziente.
- Pannello centrale dotato di doppia stecca in alluminio per immobilizzazione posteriore a 20° con possibilità di estrazione.
- Pannelli laterali dotati di stecca singola in alluminio per immobilizzazione laterale con possibilità di estrazione.
- Quattro cinghie di stabilizzazione con chiusura a velcro posizionate, a coppie, su ciascuna fascia laterale.

**Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della ginocchiera su altri pazienti.



## SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

# GINOCCHIERA IMMOBILIZZATORE 20°

### Materiali componenti

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide
Cinghie	Polipropilene
Fibbie	Poliossimetilene
Stecche	Alluminio

### Modalità di lavaggio

Rimuovere le stecche in alluminio presenti all'interno delle tre fasce e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:



### Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Confezione

1 pezzo

### Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

### Produttore

**INTERMED srl**

### Codice CND

**Y061209**

### N. Repertorio

<b>GN-006S</b>	<b>1052066/R</b>
<b>GN-006M</b>	<b>1052126/R</b>
<b>GN-006L</b>	<b>1052146/R</b>

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE