

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA MATERASSO VISCO MIXTE	Rev 00 Settembre 2013
---	---	--


Codice	Descrizione
MA-102	Materasso VISCO MIXTE 198 x 88 x 15 cm

Indicazioni

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a rischio medio e alto.

Descrizione

Il materasso VISCO MIXTE è formato da una base e da una cornice in poliuretano espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m³ contenenti una lastra di mousse viscoelastica a memoria di forma con densità di 80 kg/m³. Il tutto è ricoperto da una fodera integrale con cerniera su tre lati in tessuto Pharmatex. La concezione innovativa del materasso contribuisce a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio come l'area sacrale, l'occipitale ed il tallone.

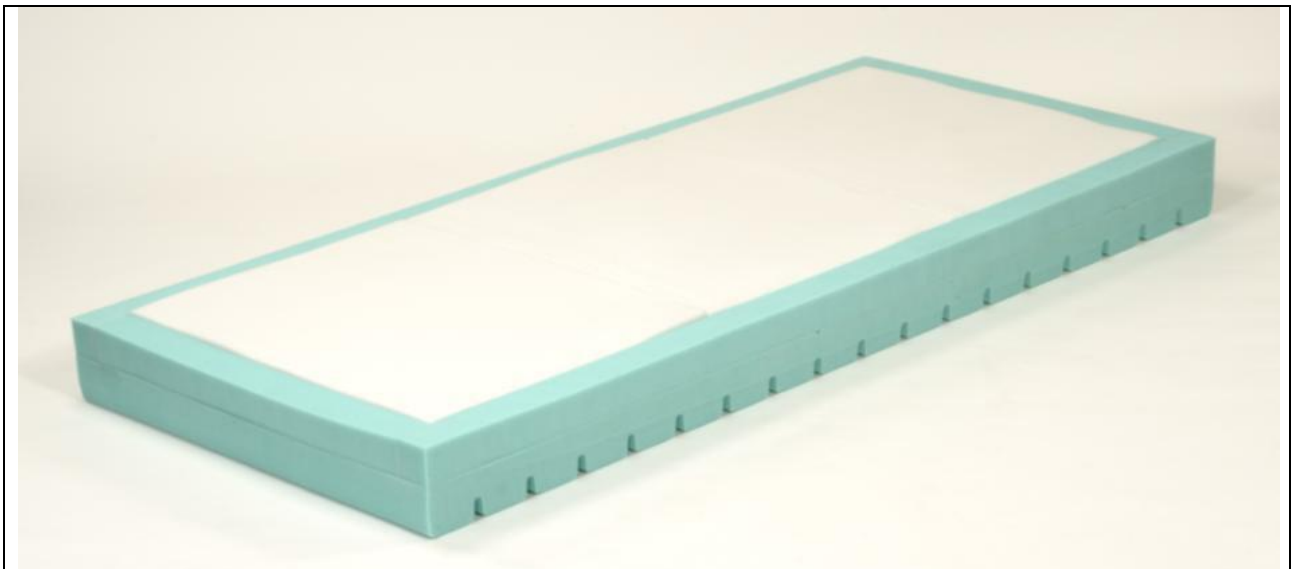

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza non risulti eccessiva rispetto alle condizioni dell'utilizzatore. Qualora ciò si verifici, si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Caratteristiche dei materiali

Poliuretano espanso	densità 37 kg/m ³	Classe 4 reazione al fuoco
Mousse viscoelastica a memoria di forma	densità 80 kg/m ³	Classe 4 reazione al fuoco
Fodera integrale Pharmatex	Poliuretano 75% - Poliestere 25%	Classe 1 reazione al fuoco

Portata **140 kg**

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Dopo un'esposizione prolungata alla luce l'espanso tende ad ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e terapeutiche.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

MATERASSO VISCO MIXTE

Rev 00

Settembre 2013

Modalità di lavaggio e disinfezione

Lavaggio fodera



Onde preservare nel tempo un buon aspetto della fodera, si suggerisce il lavaggio a 60°.

Lavaggio materasso

Spugna con detergente neutro o prodotto disinfettante.

Pulizia a vapore senza aggiunta di formaldeide.

Disinfezione

Battericidi pronti all'uso destinati a dispositivi medici.

Sterilizzazione

15 minuti a 116°C.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.06.006

Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES, Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE