

# duraband



da PB6001 a PB6013

Banda elastica  
in lattice naturale

Leggere attentamente  
e per intero  
le seguenti istruzioni.



9DCFG007901TA03.1012

## VALORI DI RESISTENZA

		Resistenza in Kg					Extra forte
		Leggera	Moderata	Media	Forte	Super forte	
Allungamento in %	66%	1,02	1,58	1,94	2,83	3,39	5,46
	100%	1,12	2,04	2,27	3,39	4,08	6,81
	133%	1,35	2,50	2,73	4,08	4,54	7,88
	166%	1,58	2,96	3,19	4,64	5,10	9,08
	200%	1,81	3,39	3,62	5,46	5,89	10,43

La tabella valori è utile per avere un riferimento prima dell'attività fisica. Permette di calcolare la resistenza necessaria per praticare correttamente l'esercizio, in funzione dell'estensione percentuale della fascia.

Per esempio, allungando fino a 60 cm una fascia, con una lunghezza di partenza di 30 cm, l'estensione/allungamento percentuale corrisponderà al 100% e la forza necessaria per tale estensione sarà 1,12 kg per la fascia leggera di colore giallo, 6,81 per la fascia extra forte di colore grigio.

È bene sapere che un semplice nodo può trasformare la banda in un anello.

Un anello di 30cm duplica il valore indicato in tabella. A fine esercizio il nodo si può sciogliere e facilmente.

## INDICAZIONI

Rieducazione post-operatoria

## PRECAUZIONI D'USO

Controllare sempre la banda elastica prima dell'utilizzo, in modo da assicurarvi che non vi siano tagli, piccole lacerazioni o fori che possano causare rotture improvvise della banda.

In caso di difetto della stessa, gettare il prodotto e sostituirlo con un pezzo nuovo.

## MANUTENZIONE

Conservare la banda a temperatura ambiente, in una scatola, al buio o al riparo dai raggi solari.

Proteggere la banda da oggetti affilati, fare attenzione con le unghie e togliere eventuali anelli prima dell'utilizzo.

Sciquare la banda con acqua corrente, fare asciugare in modo naturale e, una volta asciugate completamente, cospargerle di talco.




RO+TEN s.r.l.  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)  
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34  
www.roplusten.com - info@roplusten.com  
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)  
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).  
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio



RO+TEN  
ORTHOSERVICE  
INTERNATIONAL PARTNER

Stare  
meglio  
fa bene

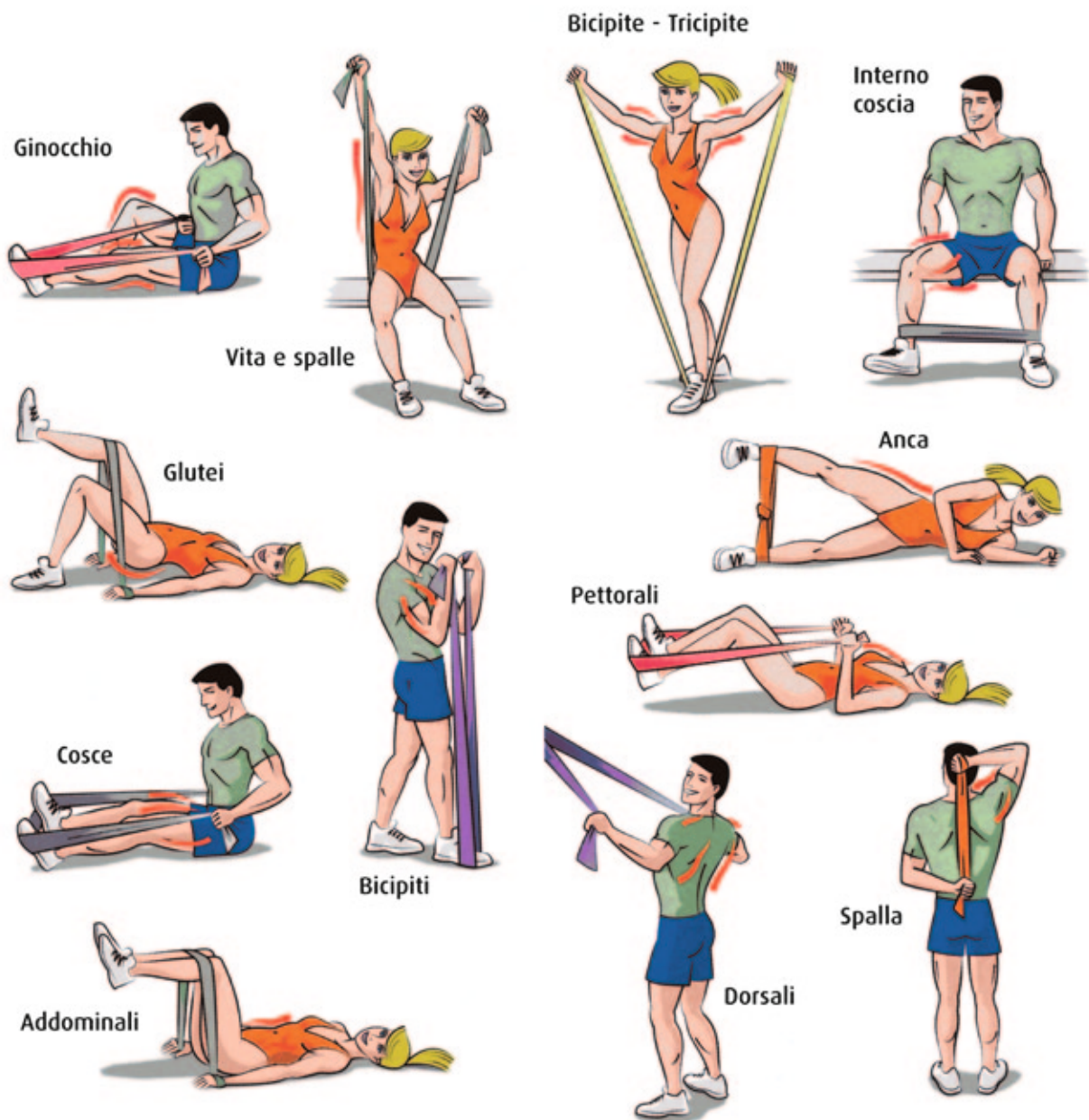

## SET IMPUGNATURE DURABAND (ART. PB6007)



Il set di impugnature, con un particolare sistema di bloccaggio, permette di rendere gli esercizi ancora più efficaci e sicuri. È sufficiente introdurre l'elastico Duraband all'interno del primo e del secondo foro di fissaggio ed infine tirare.

## AVVERTENZE

La banda elastica Duraband per esercizi di resistenza e recupero funzionale può causare gravi lesioni se non viene utilizzata correttamente.

Si consiglia l'utilizzo solo se raccomandato da personale medico o specializzato seguendo anche le istruzioni illustrate.

Si raccomanda di non utilizzare Duraband con soggetti di età inferiore a 8 anni e comunque se non assistiti da un adulto.

Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale e può causare reazioni allergiche.

Non ingerire.

## CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

