

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. via Monte Cervino, 50
20043 - Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DCFG003501TA03

crisscross

ORTHOSELF®

Corsetti elastici:

ART. PR1-1078
ART. PR1-1078N (nero)
lombosacrale

ART. PR1-1079
lombosacrale con tiranti

ART. PR1-8918
lombosacrale con tiranti
basso frontalmente

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



È un dispositivo medico indicato nella prevenzione e nel trattamento efficace delle patologie del tratto lombosacrale.

La struttura in tessuto elastico esclusivo e la particolare conformazione ad incrocio, coadiuvata da stecche in acciaio armonico, lo rendono particolarmente dinamico e consentono di distribuire uniformemente la compressione nella zona interessata, aumentandone l'efficacia. È traspirante al 100% e risulta poco visibile sotto gli abiti.

RO+TEN

stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE

Struttura in tessuto di cotone ed elastomero

Chiusura anteriore a velcro

Rinforzo posteriore ad incrocio

Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide

Tiranti laterali di rafforzamento della spinta lombare

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 *Aprire il busto e posizionarlo in modo che l'asola (A) sia rivolta verso l'alto.*
- 2 *Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola (A) per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a velcro centrale (B). Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.*
- 3 **Solo ART. PR1-1079 e ART. PR1-8918:**
stringere il corsetto agganciando i cinturini sulle apposite sedi a velcro ai lati della chiusura centrale (C).
- 4 *Se si utilizza la pelota lombare PR1-1078/P (opzionale), fissarla internamente alla banda posteriore in velcro.*

INDICAZIONI

Lombalgie
Contratture muscolari
paravertebrali
Traumi lievi alla colonna
lombosacrale

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

