

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Sede operativa e amministrativa: Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DCFG00080ITAO4

sat
MEDICALORTHO®

PR1-1335
Busto semirigido dorso-lombare (uomo)

PR1-1336
Busto semirigido dorso-lombare (donna)

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



È un dispositivo medico, leggero e confortevole, progettato per garantire il massimo sostegno, invitando il corpo ad una corretta esecuzione dei movimenti. I particolari tiranti elastici, una volta tesi e posizionati, garantiscono che ogni centimetro del busto aderisca al corpo in modo perfetto, come un abbraccio, generando il giusto grado di trazione e sostegno. L'azione di sostegno procura sicurezza e benessere, senza fastidi a livello addominale. La linea e il tessuto di cotone leggermente elasticizzato che lo caratterizzano, lo rendono esteticamente gradevole e impercettibile sotto gli abiti.

RO+TEN
stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE

Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombo-sacrale

Chiusura anteriore in velcro

Zona para-vertebrale dotata di 4 guide preconfezionate per l'inserimento di un massimo di 4 stecche rigide automodellanti (su richiesta). Grazie alle apposite guide, le stecche, se prescritte, possono essere facilmente inserite e tolte, assicurando un'azione aggiuntiva di sostegno, sicurezza e benessere su misura per ogni singolo paziente

Tessuto in cotone con una piccola percentuale di Lycra per una traspirabilità e vestibilità ottimali

Estetica gradevole

INDICAZIONI

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi

Fratture vertebrali dorsali o lombari alte e loro esiti

Cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica e metastatica

PRECAUZIONI D'USO

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida a 30° C con sapone neutro.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 *Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in velcro sulle bande laterali. Posizionare il busto in modo che l'asola sia rivolta verso l'alto.*
- 2 *Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a velcro centrale. Assicurarsi che la chiusura anteriore sia ben centrata.*
- 3 *Iniziare a stringere il busto agganciando i cinturini bassi sulla banda velcrabile anteriore.*
- 4 *Agganciare successivamente i cinturini alti sulla banda velcrabile anteriore.*
- 5 *Far passare i tiranti alti sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente avendo l'accortezza di farli passare all'interno della fettuccia passante (fig. 5a). Fissarli infine sulla banda anteriore (fig. 5b).*

