

Linear®



Corsetto elastico millerighe,
Linear 70/72

PR1-1770H basso azzurro
PR1-1770S basso nero
PR1-1772H alto azzurro
PR1-1772S alto nero

LinearPLUS70/72

PR1-1870H basso azzurro
PR1-1870S basso nero
PR1-1872H alto azzurro
PR1-1872S alto nero

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



9DCFG011300TA01_0512

CARATTERISTICHE



Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero

Chiusura anteriore a velcro

4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

Tiranti di rafforzamento della spinta lombare con incrocio posteriore (linearplus)

INDICAZIONI

Linear 70/72

Lombalgie

Contratture muscolari paravertebrali

Traumi lievi della colonna lombo-sacrale

LinearPLUS 70/72

Lombalgie

Lombosciatalgie e lombocruralgie

Spondiloartrosi e discopatie lombari

Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari

Decorso postoperatorio

Esiti di cedimenti vertebrali lombari (solo mod. PR1-1872)

Trattamento della frattura dei processi trasversi (solo mod. PR1-1872)

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.



RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC),
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio



Stare
meglio
fa bene

RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

MODALITÀ DI APPLICAZIONE LINEAR

- 1 Aprire il busto e posizionarlo in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.
- 2 Indossare il busto tendendolo e fissandolo bene con la chiusura a velcro centrale. Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.
- 3 Se viene prescritto l'utilizzo di una pelota lombare (PR1-1078/P oppure PR1-T1000 opzionali), fissarla alla banda in velcro posteriore prima di indossare il busto.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE LINEARPLUS

- 1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in velcro sulle bande laterali (fig. A)
- 2 Posizionare il busto in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.
- 3 Indossare il busto tendendolo e fissandolo bene con la chiusura a velcro centrale. Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata. (fig. B)
- 4 Stringere il corsetto agganciando i cinturini sulla banda velcrabile anteriore. SOLO modello "alto": stringere prima i cinturini bassi e poi quelli alti. (fig.C)
- 5 Se viene prescritto l'utilizzo di una pelota lombare (PR1-1078/P oppure PR1-T1000 opzionali), fissarla alla banda in velcro posteriore prima di indossare il busto.



AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

