

# Object

## Tutore in neoprene per gomito

È un dispositivo medico, confortevole e leggero, che assicura un'ottima termo-compressione a livello dell'epicondilo e dell'articolazione del gomito. La struttura in morbido neoprene bifoderato garantisce il comfort e un'ottima efficacia. L'applicazione è semplice ed immediata, la chiusura a velcro rende veloce il fissaggio, la fibbia in nylon permette di dosare la trazione controllando la compressione a livello epicondylare. E' indicato anche nell'attività sportiva.



LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO LE SEGUENTI ISTRUZIONI



### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato.
- Cinturino in velcro con passante in nylon, a livello dell'epicondilo.
- Lavabile.



### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito.
- Contratture muscolari.
- Tendinopatie.

### PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.



### COME SI INDOSSA (per il medico/tecnico ortopedico e per il paziente)



1. *Aprire il cinturino a velcro e chiuderlo provvisoriamente su se stesso.*
2. *Infilare il tubolare (con la scritta verso l'alto) a cavallo del gomito in modo che il cinturino sia posizionato a livello dell'epicondilo.*
3. *Stringere il cinturino secondo necessità e fissare con la chiusura a velcro.*

### AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

**Persone soggette a dermatiti o allergie ai prodotti derivanti dal neoprene non devono utilizzare questo tutore.**

### CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornati sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

**orthoself®** ■

*identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.*

**medicalortho®** ■

*identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.*

Grazie per aver scelto RO+TEN