

# shouldfix



**PR2-8408**

Immobilizzatore  
per braccio e spalla

Leggere attentamente  
e per intero  
le seguenti istruzioni.



9DCFG003301TA04\_0612

## CARATTERISTICHE



Struttura del reggibraccio in tessuto misto cotone



Gomito libero

Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato

Particolarmente indicato ai soggetti di corporatura robusta



Tiranti girospalla con chiusura a fibbia autobloccante

## INDICAZIONI

Fratture composte dell'omero

Lussazioni gleno-omerali

Distorsioni della spalla

Trattamento post-operatorio  
delle fratture omerali  
e negli interventi  
per lussazione gleno-omeroale

Trattamento post-operatorio  
nelle tenorrafie del capo lungo  
del bicipite omerale

## PRECAUZIONI D'USO

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.



RO+TEN s.r.l.  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)  
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34  
www.roplusten.com - info@roplusten.com  
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)  
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).  
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio




**RO+TEN**  
ORTHOSERVICE  
INTERNATIONAL PARTNER

Stare  
meglio  
fa bene

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 Alloggiare il braccio piegato ad angolo nella tasca in tela (A).
- 2 Far passare i tiranti sui fianchi.
- 3 Incrociare i tiranti sulla schiena (B) e farli passare sopra le spalle (C).
- 4 Riportare le estremità dei tiranti sul davanti, infilare i velcri uncino negli appositi passanti (D) posti all'estremità dei tiranti e fissarli alla presa a velcro asola cucita sulla tasca.
- 5 Stringere tramite le fibbie autobloccanti.
- 6 Fissare la fascia (E) sulla presa a velcro asola cucita sulla tasca.
- 7 Girare la fascia (E) attorno al tronco coprendo il braccio da immobilizzare e chiuderla su se stessa.

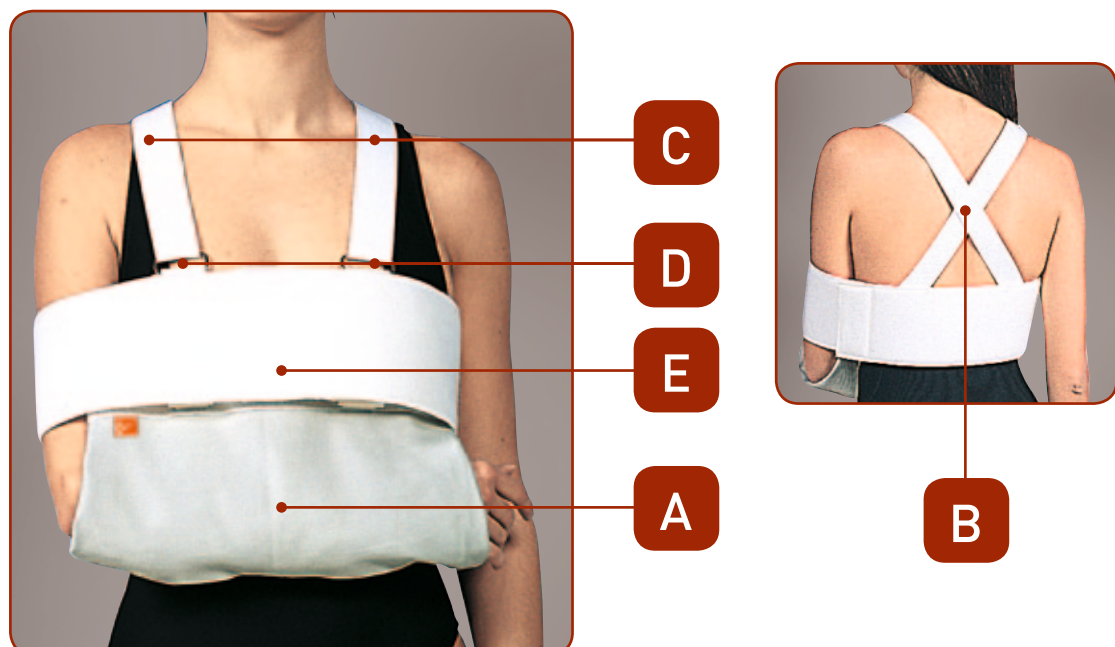

## MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida a 30° C con sapone neutro.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente.

## AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazione qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

## CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

