



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GLORIA ULCERKIT - CALZE ELASTICHE MEDICALI

Codice di riferimento: gloriamed-ulcerkit

Marca: GLORIA

Prezzo: 58.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
Ulcerkit20/20AD-Beige-S	1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, S	58.6€
Ulcerkit30/30AD-Beige-S	2° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, S	58.6€
Ulcerkit20/20AD-Beige-M	1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, M	58.6€
Ulcerkit30/20AD-Beige-M	2/1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, M	58.6€
Ulcerkit30/30AD-Beige-M	2° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, M	58.6€
Ulcerkit30/20AD-Beige-L	2/1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, L	58.6€
Ulcerkit30/30AD-Beige-L	2° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, L	58.6€
Ulcerkit20/20AD-Beige-XL	1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, XL	58.6€
Ulcerkit30/20AD-Beige-XL	2/1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, XL	58.6€
Ulcerkit20/20AD-Beige-L	1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, L	58.6€
Ulcerkit30/20AD-Beige-S	2/1° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, S	58.6€
Ulcerkit30/30AD-Beige-XL	2° Classe compressione, Beige, Gambaletto Punta Aperta, XL	58.6€

Indicazioni:

Nato dall'esigenza di Medici specialisti, Gloria UlcerKit è una calza elastocompressiva composita per il trattamento dell'ulcera venosa. Questo concetto innovativo, grazie alla semplicità d'uso, permette una migliore compliance del paziente. I vantaggi del kit sono consigliabili anche in assenza di ulcera, quando si voglia comunque utilizzare una calza terapeutica facile da indossare.

Classe 1:

Trattamento dell'ulcera (di origine venosa) in associazione ad altri ausili compressivi.

Insufficienza venosa cronica leggera, dopo varicoflebiti, dopo guarigione di ulcera, dopo scleroterapia. Prevenzione delle recidive. Varici iniziali in gravidanza.

Classe 2/1:

Trattamento dell'ulcera con azione più forte alla caviglia.

Azione compressiva più pronunciata in caviglia e minore nella zona polpaccio.

Classe 2:

Come le precedenti, ma con pressione maggiore su tutta la gamba, in caso di forte tendenza all'edema.

Controindicazioni:

Da evitare l'uso di Gloria UlcerKit in presenza di insufficienza arteriosa importante, (frequente nei diabetici). Nei casi meno gravi comunque Gloria UlcerKit può essere provato, se non adatto alla situazione sarà causa di dolore e potrà essere tolto rapidamente

Modelli e colori disponibili:

UlcerKit è disponibile in classe 1 e 2.

Grazie alla componibilità del gambaleto nei casi in cui occorra una maggiore compressione in zona malleolare (dove in genere ha sede l'ulcera) rispetto alla zona del polpaccio, esiste la possibilità di combinare la parte inferiore in classe 2 con quella superiore in classe 1.

L'assortimento di compressioni sarà quindi così definito:

- UlcerKit® 20/20:

Cavigliera KKL. 1 – Polpaccio KKL. 1

- UlcerKit® 30/20:

Cavigliera KKL. 2 – Polpaccio KKL. 1

- UlcerKit® 30/30:

Cavigliera KKL. 2 – Polpaccio KKL. 2

Taglie:

Determinazione della taglia:

Misurare la circonferenza in caviglia (punto b) per determinare la taglia. Misurare poi la circonferenza del polpaccio (punto c) verificando che le misure della gamba rientrino nel campo dei valori normali o max.

PUNTI DI MISURA

MODELLO: AD



MISURE DI CIRCONFERENZA GAMBA (cm)

	S		M		L		XL	
	normal	max	normal	max	normal	max	normal	max
c	30-33	34-37	34-37	38-41	38-41	42-45	42-45	46-49
b	19-21		22-24		25-27		28-31	



Consigli:

Avvertenze:

Le calze sono intese per uso diurno salvo prescrizione medica per l'uso notturno. Non è necessario togliere la calza per un eventuale breve riposo diurno.

Suggerimenti:

Indossare le calze prestando attenzione ad anelli e ad unghie appuntite o rovinate che potrebbero danneggiare le calze. Si consiglia quindi l'utilizzo di guanti in gomma. Non tagliare eventuali fili sporgenti all'interno delle calze.

Modalità di lavaggio:

Lavare le calze in acqua calda max 40° con detersivi delicati. Asciugare lontano da fonti di calore senza torcere la calza ma ponendola tra due panni asciutti.

- Non candeggiare, non usare solventi o benzina. Evitare l'uso di ammorbidenti
- Non stirare
- Non lavare a secco. Non utilizzare sostanze chimiche
- Non usare l'asciugatrice.

 **Acquista subito**