



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

HISTOFREEZER® MIX - 2 x 80 ml + 24 applicatori da 2 mm e 36 applicatori da 5 mm

Codice di riferimento: 30589

Marca: GIMA

Prezzo: 91.2€

CARATTERISTICHE:

Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo.

Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne:

- Verruca volgare
- Verruca plantare
- Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
- Lentigo (macchie dell'età)
- Condilomi (verruche genitali)
- Cheratosi seborroica
- Fibroma peduncolato
- Verruca piana
- Cheratosi attinica (facciale e non facciale)

Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.

Gli applicatori da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi.

Il kit include due bombolette aerosol da 80 ml, 24 applicatori da 2 mm e 36 applicatori da 5 mm.

Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL.

Disponibile su internet: GR, PT, TH, arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30589

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 kit

Domande frequenti

Come si usa Histofreezer mix agente crioterapico?

Per usare correttamente Histofreezer mix agente crioterapico è necessario fissare l'applicatore alla bomboletta, rimuovere il coperchio protettivo dal pulsante e spruzzare il gas nell'applicatore fino a quando non fuoriescono delle goccioline. È importante tenere l'applicatore capovolto e attendere 15 secondi fino a quando non raggiunge la temperatura effettiva di funzionamento. Appoggiare l'applicatore sul tessuto su cui occorre effettuare la terapia ed esercitare una leggera pressione.

A cosa serve Histofreezer mix agente crioterapico?

Histofreezer è un dispositivo utile per la critoterapia tradizionale con la praticità della confezione aerosol. È utile dopo infortuni muscolari, in presenza di infiammazioni acute e per il trattamento di verruche.

Esistono effetti indesiderati legati all'uso di Histofreezer mix agente crioterapico?

La critoterapia può causare una sensazione di bruciore intenso sulla pelle che tende a migliorare quando il paziente è informato sulla sensazione di dolore che può verificarsi. Questo dipende anche dal numero di lesioni e dagli interventi di preparazione al trattamento.

Come funziona Histofreezer?

Il prodotto funziona in base al principio secondo cui le cellule cutanee si mostrano tutte sensibili al congelamento in modo diverso. Grazie all'uso di Histofreezer mix agente crioterapico è possibile facilitare il trattamento delle lesioni e rimarginare ferite senza lasciare alcuna cicatrice.

