



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

HISTOFREEZER® MIX MINI - 80 ml + 15 applicatori 2 mm, 15 applicatori 5 mm

Codice di riferimento: 30585

Marca: GIMA

Prezzo: 81.4€

Presidio che garantisce tutta l'efficacia della crioterapia tradizionale in una pratica bomboletta spray.

Grazie a questo sistema innovativo il costo di un trattamento individuale risulta fortemente ridotto in confronto alle soluzioni alternative. Histofreezer® si applica in poco tempo oltre ad essere facilmente trasportabile. Estesi studi ed analisi cliniche hanno dimostrato la straordinaria efficacia del prodotto che si attesta agli stessi livelli delle applicazioni ad azoto liquido. Il liquido refrigerante di Histofreezer® è composto da una particolare soluzione di etere dimetilico, propano e isobutano che causa il "congelamento" della parte trattata. In seguito si otterrà il distacco dell'epidermide dai tessuti cutanei sottostanti con conseguente eliminazione della lesione virale.

Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne:

- Verruca volgare
- Verruca plantare
- Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
- Lentigo (macchie dell'età)
- Condilomi (verruche genitali)
- Cheratosi seborroica
- Fibroma pedunculato
- Verruca piana
- Cheratosi attinica (facciale e non facciale)

Questo metodo presenta una serie di vantaggi significativi per il paziente:

-
- non richiede anestesia locale, suture o fasciature, quindi riduce al minimo i tempi di recupero dall'intervento
 - danneggia in misura estremamente limitata i tessuti sani
 - limita il rischio di anestetiche depigmentazioni e cicatrici.

Procedimento:

- Inserire il beccuccio nel foro della bomboletta
- Premere il pulsante fino alla saturazione della punta (comparsa di alcune gocce di gas liquido)
- Attendere 15 secondi circa per ottenere l'evaporazione del gas e il conseguente raffreddamento a -55°C
- Appoggiare la punta sulla lesione da trattare per un tempo variabile tra 15 e 40 sec. a seconda della tipologia di lesione.

Include una bombola aerosol da 80 ml, 15 applicatori da 2 mm e 15 applicatori da 5 mm.

