



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MEDIVEN THROMBEXIN 18 MM HG - CALZE ANTITROMBO POST-OPERATORIE - BIANCHE

Codice di riferimento: THROMBEXIN-18

Marca: MEDIVEN

Prezzo: 25.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
TromboAD-XS-140	Gambaletto, XS	35€
TromboAG-XS-140	Autoreggente, XS	35€
TromboAD-S-140	Gambaletto, S	35€
TromboAG-S-140	Autoreggente, S	35€
TromboMonoAT-S-140-paio	Monocollant dx e sx (Paio), S	35€
TromboMonoAT-S-DX-140	Monocollant Destro, S	35€
TromboMonoAT-S-SX-140	Monocollant Sinistro, S	35€
TromboAG-M-140	Autoreggente, M	35€
TromboMonoAT-M-140-paio	M, Monocollant dx e sx (Paio)	35€
TromboMonoAT-M-DX-140	M, Monocollant Destro	35€
TromboAD-L-140	Gambaletto, L	35€

TromboAG-L-140	Autoreggente, L	35€
TromboMonoAT-L-140-paio	L, Monocollant dx e sx (Paio)	35€
TromboMonoAT-L-DX-140	L, Monocollant Destro	35€
TromboMonoAT-L-SX-140	L, Monocollant Sinistro	35€
TromboAD-XL-140	Gambaletto, XL	35€
TromboAG-L-X-140	Autoreggente, L-X	35€
TromboAG-M-X-140	Autoreggente, M-X	35€
TromboAG-S-X-140	Autoreggente, S-X	35€
TromboAG-XL-140	Autoreggente, XL	35€
TromboAG-XL-X-140	Autoreggente, XL-X	35€
TromboAD-L-X-140	Gambaletto, L-X	35€
TromboAD-M-140	Gambaletto, M	35€
TromboMonoAT-L-X-DX-140	L-X, Monocollant Destro	35€
TromboMonoAT-L-X-SX-140	L-X, Monocollant Sinistro	35€
TromboMonoAT-M-SX-140	M, Monocollant Sinistro	35€
TromboMonoAT-L-X-140-paio	L-X, Monocollant dx e sx (Paio)	35€

Il campo di applicazione si estende alla prevenzione delle trombosi prima, durante e dopo un intervento chirurgico. Se il rischio di trombosi è moderato o elevato, la prevenzione con le calze preventive antitrombo viene integrata spesso con medicinali (es. eparina) e con altre misure (es. ginnastica medica).

Mediante una compressione che si riduce progressivamente dalla caviglia (circa 18 mmHg) alla coscia (circa 8 mmHg), il ritorno del sangue venoso viene accelerato in maniera ottimale.

Vantaggi del prodotto

- Apertura per l'ispezione
- Tallone 3D
- Marcatura colorata

- Anello autoreggente in silicone
 - Punta antibatterica
-
- Eccezionale comfort

Componenti materiali

82% di poliammide, 18% di elastan, senza lattice

Indicazioni

- Profilassi antitrombotica per i pazienti immobilizzati, prima, durante e dopo l'operazione
- Post-parto
- Pazienti allettati

Come agisce

La caratteristica principale che una calza antitrombo deve avere è il corretto gradiente compressivo decrescente dal basso verso l'alto e solo rispettando questo parametro si può ottenere un'accelerazione del flusso ematico efficace per la profilassi. Ampia gamma di modelli e taglie con circonferenza alla coscia fino a 100 cm. Unica lunghezza grazie al filato biestensivo della calza.

Caratteristiche

- Calza antitrombo, con gradiente di compressione medicalmente corretto
- Pratica e salva tempo. Alleggerisce il compito degli infermieri e ottimizza l'assistenza al paziente
- Sistema di indicazione della misura con codice colore, per facilitare la scelta corretta della taglia
- Maggiore tollerabilità, grazie alla elevata elasticità e alla maglia a traspirante particolarmente morbida e delicata sulla pelle
- Può essere riutilizzata fino a 10 volte senza perdere le sue caratteristiche terapeutiche.

Caratteristiche del prodotto

mediven thrombexin 18 garantisce sempre la giusta compressione, che decresce dalla caviglia alla coscia.



Anello in silicone "intelligente"

L'anello in silicone autoreggente non solo riduce il rischio di scivolamento della calza, ma è anche un rapido indicatore di misura.



Tallone con codice colore

Il tallone con codice colore, con la sua superficie interna rafforzata, riduce il rischio di irritazioni da troppa pressione, ed evidenzia il corretto posizionamento della calza.



Foro d'ispezione

Il foro d'ispezione sulla pianta del piede consente agli infermieri di controllare la circolazione del sangue.



Punta antibatterica


La punta antibatterica e antimicotica della calza riduce la formazione di micosi, anche dopo ripetuti lavaggi.



Ausilio per indossare la calza

L'innovativo butler medi hospital rende semplice indossare le calze mediche per la profilassi antitrombotica.

TAGLIA	CIRCONFERENZE			
	CAVIGLIA cB	POLPACCIO cC	SOTTO IL GINOCCHIO cD	COSCIA cG
Gambaletto (AD)				
XS	17 - 19	26 - 32	25 - 31	—
S	20 - 22	30 - 38	29 - 37	—
M	23 - 25	34 - 44	33 - 43	—
L	26 - 28	38 - 48	37 - 47	—
L - X	26 - 28	44 - 55	43 - 54	—
XL	29 - 31	44 - 55	43 - 54	—
Calza Coscia (AG)				
XS	17 - 19	26 - 36	25 - 35	40 - 50
S	20 - 22	30 - 42	29 - 41	48 - 60
S - X	20 - 22	30 - 42	29 - 41	56 - 70
M	23 - 25	34 - 46	33 - 45	56 - 70
M - X	23 - 25	34 - 46	33 - 45	64 - 80
L	26 - 28	38 - 51	37 - 50	64 - 80
L-X	26 - 28	38 - 51	37 - 50	72 - 90
XL	29 - 31	42 - 55	41 - 54	72 - 90
XL - X	29 - 31	42 - 55	41 - 54	80 - 100
Monocollant (AG)				
S	20 - 22	30 - 42	29 - 41	48 - 60
M	23 - 25	34 - 46	33 - 45	56 - 70
L	26 - 28	38 - 51	37 - 50	64 - 80
L - X	26 - 28	38 - 51	37 - 50	72 - 90

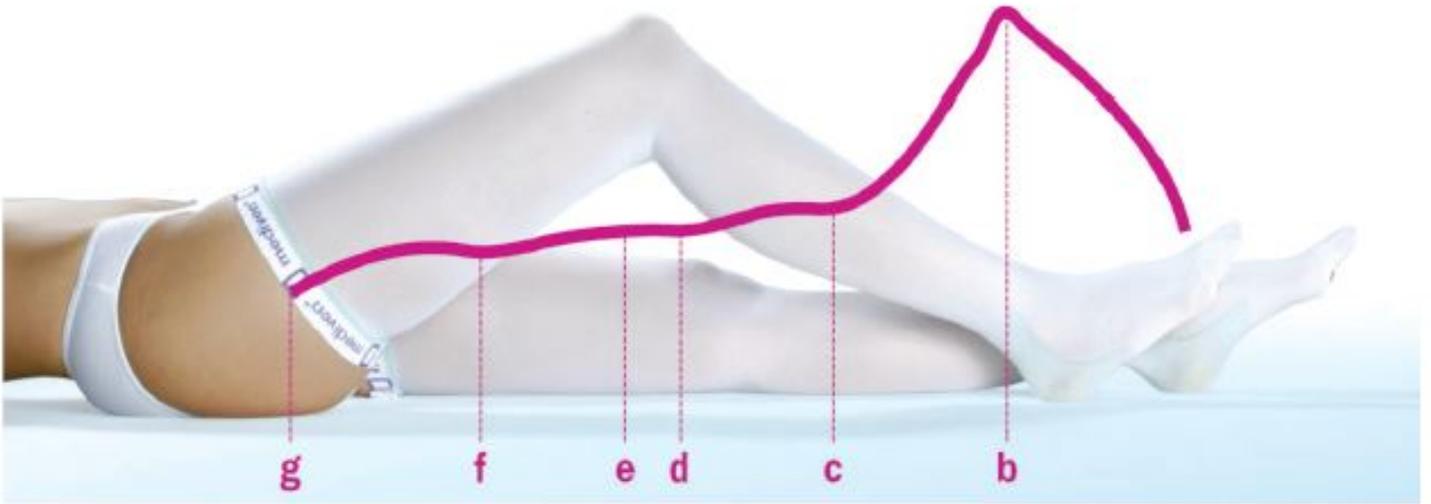

 **Acquista subito**