

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mod. clavisan bendaggio clavicolare

Codice di riferimento: mod clavisan

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 48.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod clavisan-Small	Small	48.6€
mod clavisan-Medium	Medium	48.6€
mod clavisan-Large	Large	48.6€
mod clavisan-XLarge	XLarge	48.6€

Caratteristiche

BENDAGGIO CLAVICOLARE

Sono stati impiegati i seguenti materiali di alta qualità:

- imbottiture clavicolari in gommapiuma, rivestite di maglia in cotone anallergica
- allacciatura posteriore munita di fibbia di regolazione
- le imbottiture clavicolari si agganciano posteriormente ed esercitano un'azione distraente e immobilizzante delle spalle
- disegno a profilo fisiologico per evitare fastidiose compressioni nell'incavo ascellare
- realizzato in materiali no-stretch per ottenere la massima stabilità

AREE DI SUPERIORITÀ

- facilità di applicazione
- estrema praticità e leggerezza

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Scelto il bendaggio della misura adeguata, posizionare la placca posteriormente tra le scapole, portare le bretelle prima davanti alle spalle, poi sotto le ascelle ed infilare posteriormente, quindi stringere le allacciature posteriori fino a raggiungere la tensione necessaria.

Indicazioni

Patologie e traumatismi acromion-clavicolari, correzioni posturali del cingolo scapolo-omerale

Taglie disponibili


Misura della circonferenza della spalla:

Small (da 56 a 68 cm)

Medium (da 69 a 78 cm)

Large (da 79 a 88 cm)

XLarge (da 89 a 100 cm)

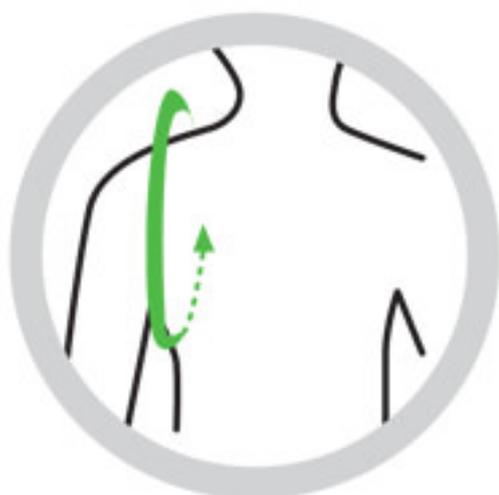

 **Acquista subito**